


EMPRESA

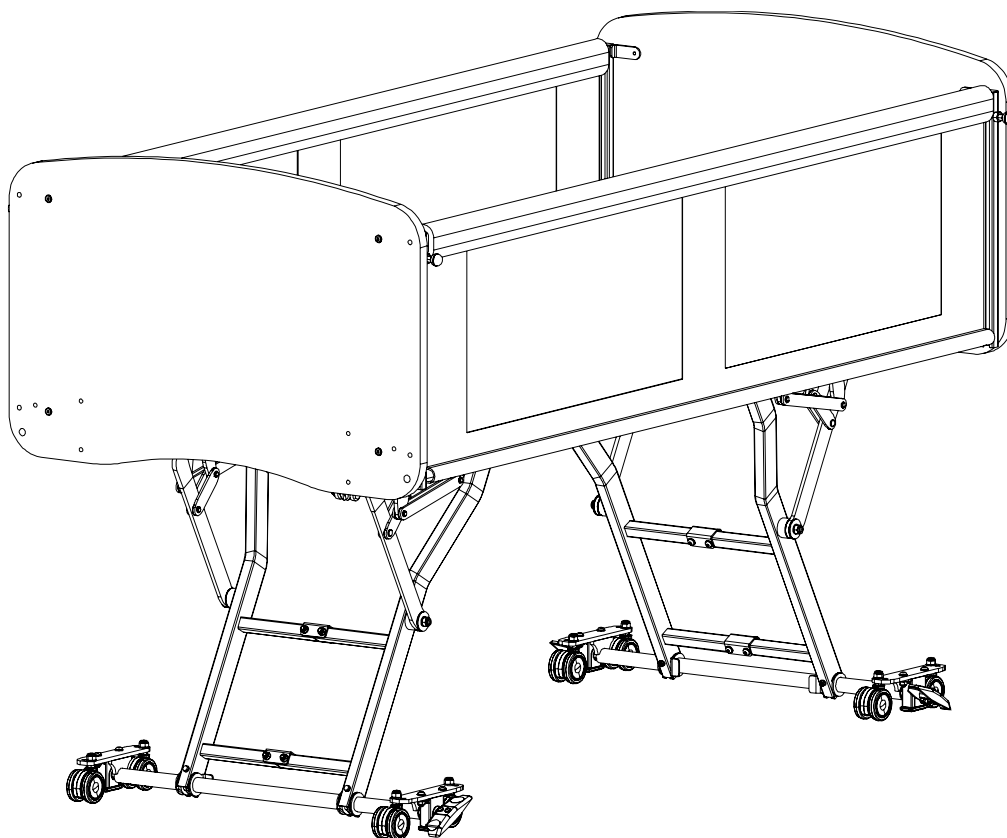

Côtés de lit en tissu Empresa Manuel d'utilisation

IFU-FL6-006FR Rev 01

Accora

Table des matières

Titre	Page
Description du produit -----	3
 Mises en garde générales -----	4
1. Modes de livraison -----	4
2. Consignes de sécurité -----	5
3. Utilisation prévue -----	5
4. Spécifications techniques -----	5
5. Compatibilité -----	5
6. Montage -----	6
7. Fonctionnement -----	11
8. Contrôle de fonctionnement -----	13
9. Nettoyage et désinfection -----	13
10. Procédure de nettoyage -----	14
11. Stockage -----	14
12. Inspection quotidienne -----	14
13. Entretien général -----	15
14. Garantie -----	15
15. Mise au rebut -----	15
16. Tableau des symboles -----	16
17. Coordonnées de contact -----	18

Translated from IFU-FL6-006EN Rev 02

Bienvenue

Cher client, Chère cliente,

Merci d'avoir acheté un produit de santé Accora. Avant d'utiliser les barrières en tissu, vous devez lire et comprendre toutes les instructions de ce manuel. Toutes les utilisations et manipulations des barrières en tissu doivent être effectuées conformément aux instructions de ce manuel.

Veuillez vous assurer que le manuel est à la disposition des utilisateurs et des opérateurs pendant toute la durée de vie du lit.

Contactez-nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Voir la section 17 pour les coordonnées de contact par région.

Généralités

La barrière en tissu est classée comme dispositif médical de classe 1 conformément au règlement sur les dispositifs médicaux 2017/745.



Avis aux utilisateurs

Si un incident grave se produit en rapport avec ce dispositif médical, affectant l'utilisateur ou le patient, alors l'utilisateur ou le patient doit signaler l'incident grave au fabricant (ou distributeur) du dispositif médical et, dans l'Union européenne, l'utilisateur doit également signaler l'incident grave à l'autorité compétente de l'État membre où il se trouve.




Accora Ltd, 38 Main Street,
Swords, Co. Dublin, Ireland, K67 E0A2
T : +353 (0)1 695 0614

Politique de conception et propriété intellectuelle

® et ™ sont des marques commerciales appartenant à Accora Ltd, sauf indication contraire. Notre politique étant axée sur l'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les modèles sans préavis. © Accora Ltd 2020.

Description du produit

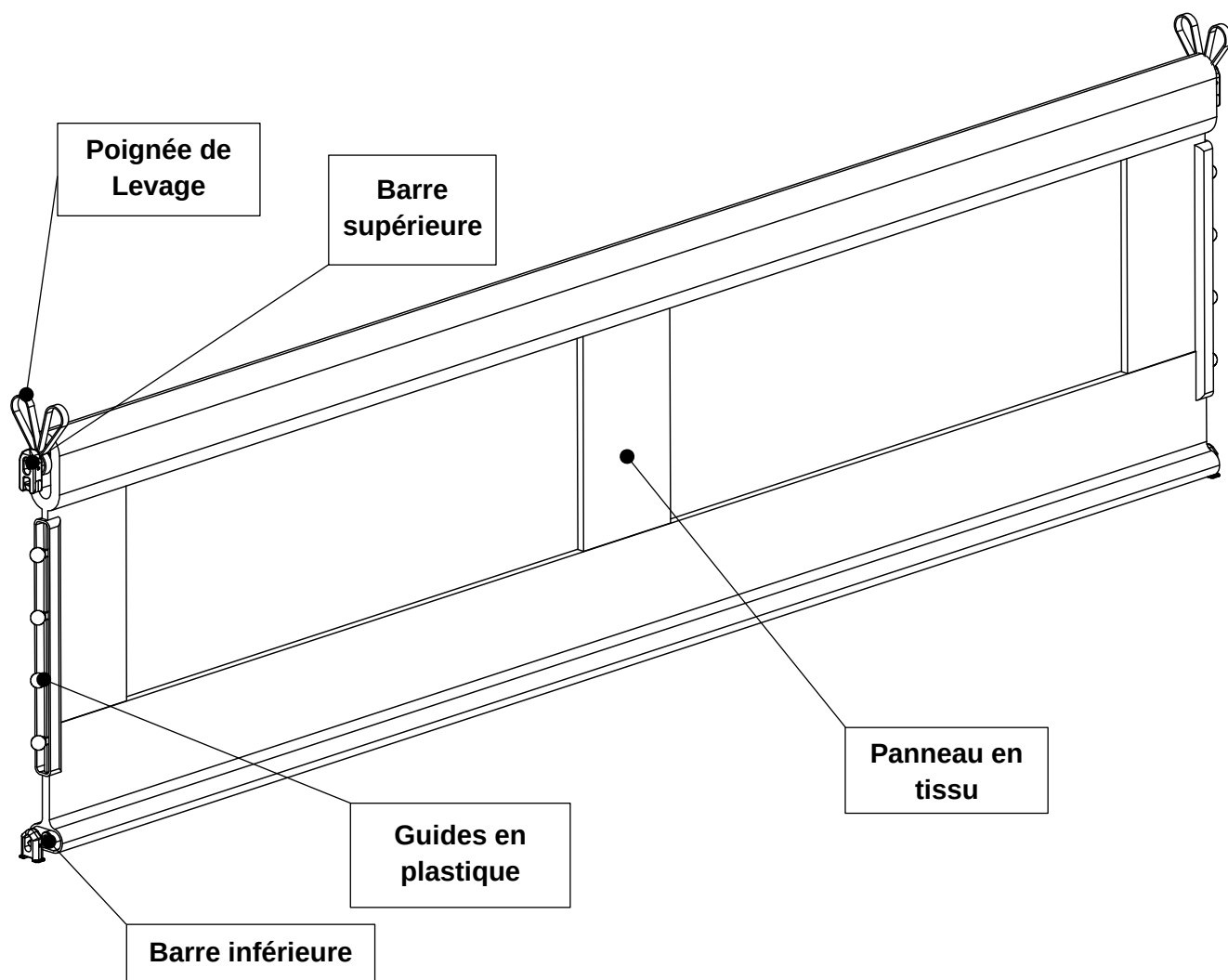



Mises en garde générales

1. Conservez ce manuel d'instructions pour référence ultérieure.
2. Ces instructions doivent être respectées pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce lit et la sécurité des utilisateurs et des soignants.
3. Ces barrières en tissu doivent être assemblées, positionnées et utilisées conformément à ces instructions.
4. Les dispositifs de sécurité pour l'utilisation des barrières en tissu et les instructions doivent être strictement observés.
5. Ces barrières en tissu ne doivent pas être exposées à la fumée, aux flammes nues, aux températures extrêmes, aux gaz inflammables ou à d'autres substances ou situations dangereuses.
6. Accora ne peut être tenu responsable des dommages, blessures ou accidents résultant de modifications non autorisées, de pièces de rechange non authentiques, de négligence ou d'une utilisation non conforme à ce manuel pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.
7. Lors du raccordement d'autres équipements électroniques utilisés avec le lit (par exemple, une pompe à matelas pneumatique), assurez-vous que les câbles ne peuvent pas être pincés, écrasés ou endommagés par la barrière en tissu.
8. N'attachez rien aux barrières en tissu.
9. Ne jamais s'asseoir, se tenir debout ou s'accrocher sur les barrières en tissu.
10. Ne déplacez pas le lit en poussant ou en tirant sur les barrières en tissu.
11. Les patients ou les utilisateurs doivent faire l'objet d'une évaluation des risques afin de s'assurer qu'ils comprennent ce manuel et qu'ils utilisent la barrière en tissu sans risque pour eux-mêmes ou pour les autres.
12. N'utilisez que des barrières compatibles fournis par Accora avec ce lit. Des barrières incompatibles peuvent créer de graves dangers.

13. Les barrières latérales ne doivent pas être utilisées pour la contention d'un patient. Les risques pour les patients doivent être évalués par un clinicien qualifié.
14. Lorsqu'un matelas spécial ou un surmatelas est utilisé et que la distance entre le haut du matelas non comprimé et le haut de la barrière, le cas échéant, est inférieure à 220 mm/8,7 pouces, une évaluation des risques doit être effectuée pour assurer une sécurité équivalente.
15. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de ce lit, sauf sous la surveillance d'un adulte, car il existe un risque de blessure et/ou d'étouffement avec de petites pièces.
16. Le montage et l'installation DOIVENT être effectués par du personnel dûment formé et qualifié.
17. Ne modifiez pas les barrières en tissu.
18. N'installez pas les barrières latérales lorsqu'un utilisateur est dans le lit. L'utilisateur doit être transféré hors du lit avant de monter les barrières latérales.

1. Modes de livraison -----

La barrière latérale en tissu est fournie en deux ou trois boîtes comme suit :

Ancien emballage :

1. Supports latéraux.
2. Tissu et barres latérales.

Nouveau type d'emballage :

1. Supports latéraux.
2. Tissu de barrière.
3. Barres latérales.

La barrière latérale de 220cm comprend une boîte supplémentaire :

Emballages des barrières latérales.

Une inspection doit avoir lieu à la réception pour s'assurer que la livraison est complète et non endommagée.

Toute pièce manquante, défaut ou dommage doit être signalé immédiatement au transporteur et à Accora par écrit.

2. Consignes de sécurité -----

1. Avant d'utiliser les barrières en tissu, vous devez lire le manuel d'instructions et utiliser le lit conformément à celui-ci.
2. La barrière en tissu ne doit pas être utilisée si des défauts y ont été détectés pouvant causer des blessures au patient, au personnel ou à une tierce personne, au lit ou à l'environnement.
3. Avant de nettoyer les barrières en tissu, l'alimentation électrique doit être déconnectée du lit,
4. Lors de la réparation de la barrière en tissu, seuls les matériaux et les composants d'origine doivent être utilisés. Dans le cas contraire, le fabricant ne peut pas garantir contre les dommages qui pourraient survenir.

3. Utilisation prévue -----

Les barrières en tissu ne peuvent être utilisées qu'avec Empresa.

Sous réserve d'une évaluation des risques, les barrières latérales peuvent contribuer à créer un environnement plus sûr pour l'utilisateur du lit.

4. Spécifications techniques -----

Numéro de pièce / Description	L'ensemble comprend
SDR-0-FL6-000 Une barrière 200cm, FL6 (lit de longueur standard)	SDRBR-0-FL6-000 + FABKIT-0-CB1-000 OU SDRBR-0-FL6-000 + SDRFAB-0-FL1-100 + SDRMET-0-FL1-100
SDREX-0-FL6-000 Une barrière latérale 220cm, FL6 (lit rallongé)	SDRBR-0-FL6-000 + FABEXKIT-0-CB1-000 + SDRPCK-0-FL6-000 OU SDRBR-0-FL6-000 + SDRFABEX-0-FL1-100 + SDRMETEX-0-FL1-100 + SDRPCK-0-FL6-000

L'ensemble de tête de lit répertorié ci-dessous doit être installé sur l'Empresa lors de l'installation des barrières en tissu :

Numéro de la pièce	Description
HDBSDRKT-0-FL6-010	Kit tête et pied de lit Arc Design pour barrières en tissu L'ensemble comprend : 2 x HDBSDR-0-FL6-010 Tête/Pied de lit 8 boulons M8 x 45 mm

Les barrières en tissu peuvent être montées sur les modèles Empresa suivants :

Numéro de la pièce	Description
NSB-0-FL6-000	Empresa, freins de roulette aux deux extrémités
NSB-1-FL6-000	Empresa, roulettes et freins centraux
NSB-2-FL6-000	Empresa, freins centraux aux deux extrémités

Remarque : certains numéros de pièces de lit peuvent être suffixés pour indiquer la région (par exemple UE, US).

Informations environnementales :

Condition	Plage de températures	Humidité relative	Pression atmosphérique	Mètres au dessus du niveau de la mer.
Utilisation	De +5°C à +40°C De +41°F à +104°F	De 20% à 80% (Sans condensation)	De 700 hPa à 1 060 hPa	Max. 3 000 mètres
Transport/stockage	De - 10°C à + 50°C 14°F à +122°F			

Les accessoires et pièces de rechange pour les barrières en tissu sont répertoriés ci-dessous :

Numéro de la pièce	Description
MTINF-0-FL1-000	Ajusteur de matelas (s'adapte entre le matelas et les barrières)
FABKIT-0-CB1-000	Tissu et barres latérales 200cm
FABEXKIT-0-CB1-000	Tissu et barres latérales 220cm
SDRFAB-0-FL1-100	Tissu 200cm
SDRFABEX-0-FL1-100	Tissu 220cm
SDRMET-0-FL1-100	Barres latérales 200 cm
SDRMETEX-0-FL1-100	Barres latérales 220cm
SDRBR-0-FL6-000	Jeu de supports pour barrières latérales, FL6
SDRPCK-0-FL6-000	Emballage du kit de barrière en tissu 220cm, FL6
SDRKIT1-0-FL6-000	Kit de fixation des supports, FL6
SDRKIT2-0-FL1-000	Kit de fixation toile latérale
SDRPLST-0-FL1-000	Sangle latérale

5. Compatibilité -----

Le tableau ci-dessous indique la compatibilité avec d'autres accessoires Empresa.

Accessoire monté sur Empresa	Barrières en tissu	Notes
WDEX-0-FL6-000 Kit de réglage de la largeur.	☒	Utiliser les bonnes positions de fixation de la tête de lit
STLEV-0-FL6-000 Lever pour lit standard	☒	

6. Montage -----



AVERTISSEMENT

Le montage DOIT être effectué par du personnel dûment formé et qualifié.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées après assemblage par une personne dûment formée et qualifiée.

Le montage DOIT avoir lieu dans un endroit clair et dégagé ; les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart.

Si les barrières en tissu sont souillées ou contaminées pendant le transport, reportez-vous aux instructions de nettoyage et de désinfection.

Assurez-vous que les freins des roulettes sont verrouillés avant de monter les barrières en tissu.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de patient dans le lit lorsque vous installez les barrières en tissu.

Lorsqu'un matelas spécial ou un surmatelas est utilisé et que la distance entre le haut du matelas non comprimé et le haut de la barrière, le cas échéant, est inférieure à 220 mm/8,7 pouces, une évaluation des risques doit être effectuée pour assurer une sécurité équivalente.

Le kit de montage doit contenir les composants suivants :

Housse en tissu Quantité 2	
Barre inférieure Quantité 2	
Barre supérieure Quantité 2	

Support latéral Quantité 2 x G 2 x D	
Poignée de levage Quantité 4	
Boulon de fixation de la barre inférieure M8 x 25 Quantité 4	
Écrou de fixation du support M6 x 20 Quantité 8	
Fixation de tête de lit Boulon M8 x 45 Quantité 8 (inclus avec le kit de tête de lit)	
Emballage des barrières pour les barrières de 220cm uniquement Plaques Quantité 4 Boulons M8 x 55 Quantité 8	

Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, elle doit être signalée immédiatement au transporteur et à Accora par écrit.

Vous aurez besoin des outils suivants pour assembler et ajuster les barrières en tissu :

1. Clés Allen de 4mm et 5mm.
2. Clé plate de 10mm

Avant d'installer la barrière latérale en tissu, élevez le lit d'environ 30cm du sol.

La barrière latérale en tissu est montée des deux côtés du lit.

1. Avant d'installer le kit de barrières en tissu, la tête de lit et le pied de lit existants devront être retirés (voir Figure 6.1).

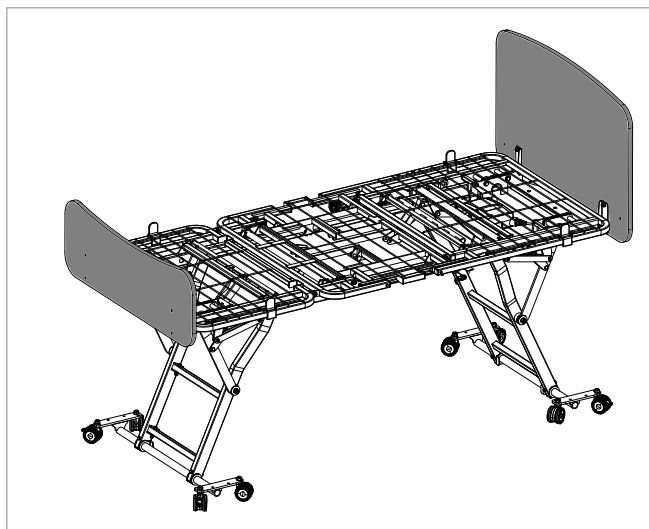


Figure 6.1

2. Desserrez les écrous qui maintiennent la tête et le pied du lit en position. Retirez les attaches ainsi que la tête et le pied de lit. Les boulons M8 ne sont plus nécessaires car ils sont remplacés par les boulons M8 x 45 fournis dans le kit de tête de lit. Conservez les écrous et rondelles pour les réutiliser plus tard (voir Figure 6.2).

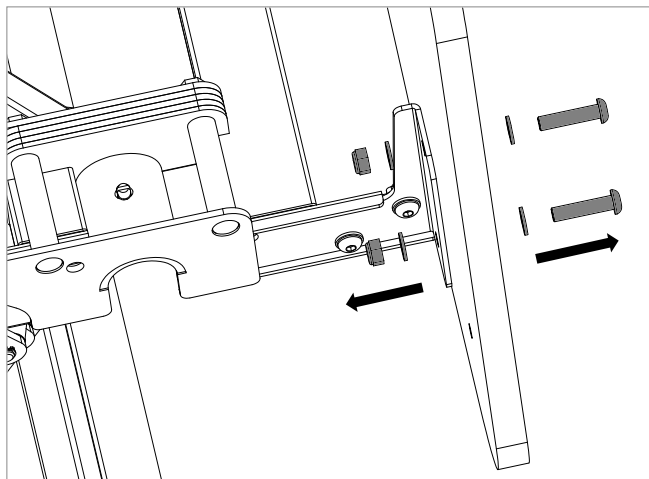


Figure 6.2

3. Assurez-vous que les supports de tête de lit et de pied de lit sont dans la bonne position pour la longueur de la barrière latérale en tissu à installer (voir Figure 6.3) :

Longueur du lit	Longueur de la barrière en tissu	Position des supports de tête de lit / pied de lit
Standard	200 cm	Position la plus intérieure
Rallongé	220cm	Position la plus externe

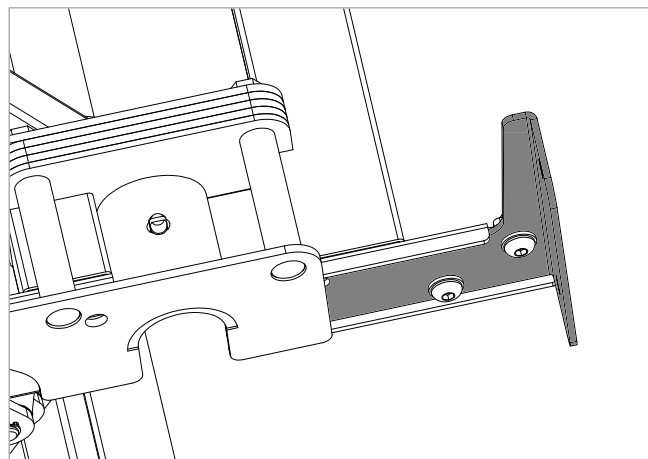


Figure 6.3

4. Montez la nouvelle tête de lit et le nouveau pied de lit à l'aide des nouveaux boulons M8 x 45 et des écrous et rondelles d'origine. Les boulons de remplacement M8 x 45 doivent être utilisés car ils sont plus longs pour s'adapter à la nouvelle tête et au pied de lit plus épais (voir Figure 6.4).

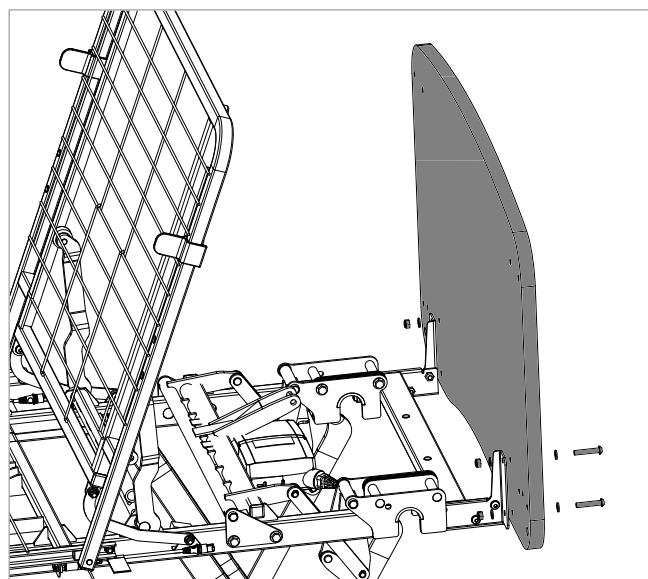


Figure 6.4

5. Si vous installez une barrière de 220 cm, placez un emballage de barrière entre la tête ou le pied de lit et le support.

Le côté plat de l'emballage doit être contre la tête et le pied de lit. Utilisez les boulons M8 x 55 fournis avec le kit d'emballage de la barrière pour fixer la tête de lit et le pied de lit aux supports (voir Figure 6.5)

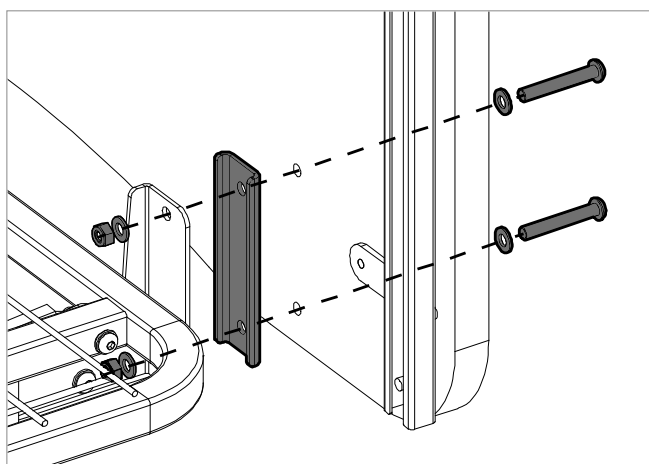


Figure 6.5

6. L'Empresa avec la nouvelle tête et le nouveau pied de lit.

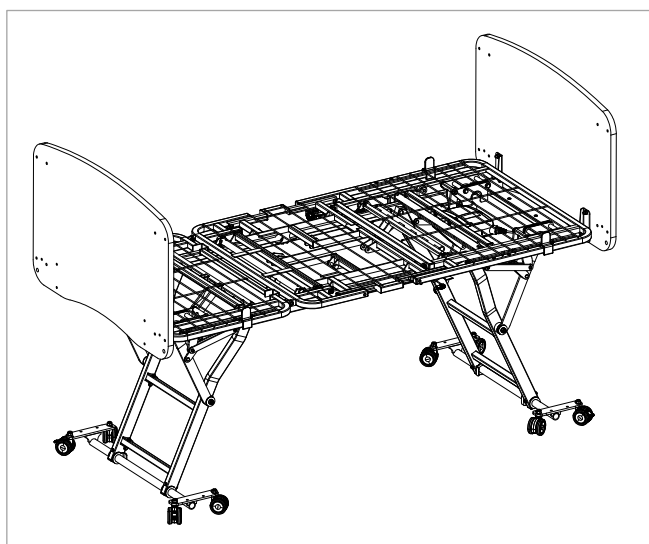


Figure 6.6

7. Avant de monter les supports de rail gauche et droit, retirez les boulons M8 (article 1) et les écrous à épaulement M6 (article 2) des supports (voir Figure 6.7).

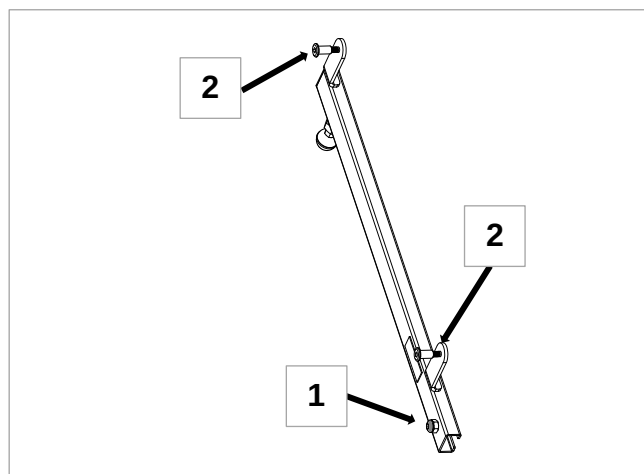


Figure 6.7

8. Il y a deux positions sur la tête de lit pour installer les supports de côté gauche et droit. Les trous extérieurs (A) sont pour les lits avec des kits de réglage de largeur installés et les trous intérieurs (B) sont pour les lits de largeur standard (voir Figure 6.8).

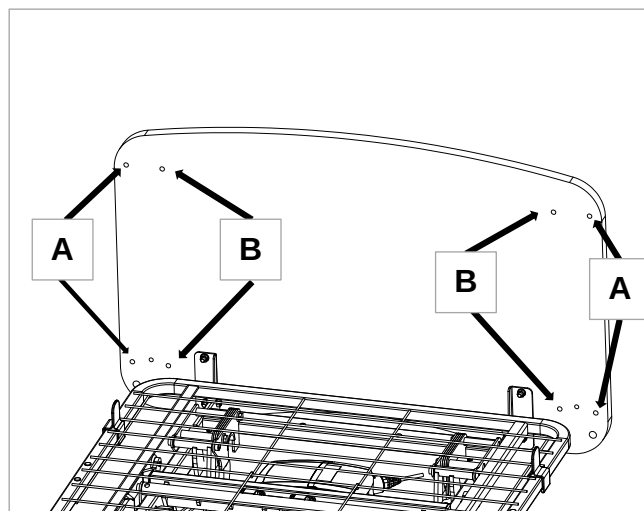


Figure 6.8

Important ! – les supports de barrière doivent être installés dans les trous de fixation appropriés au niveau de la tête et du pied de lit.

9. Installez les supports de côté gauche et droit sur la tête de lit comme illustré et fixez-les en place à l'aide des écrous à épaulement M6. Serrez à l'aide d'une clé Allen de 4 mm (voir Figure 6.9).

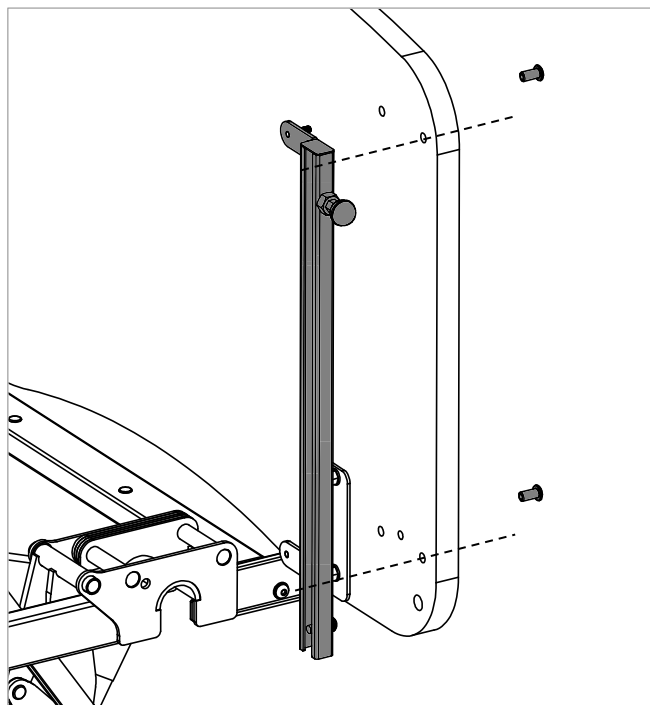


Figure 6.9

10. Répétez les étapes ci-dessus pour installer les supports de barrière latérale sur le pied de lit.
11. Retirez l'une des housses en tissu de la barrière de son emballage et étalez-la sur une surface plane avec les étiquettes vers le haut. (Étiquette « Haut et extérieur » vers le haut.)
12. Insérez la barre supérieure et fermez le rabat supérieur de la housse en tissu (voir Figure 6.10).

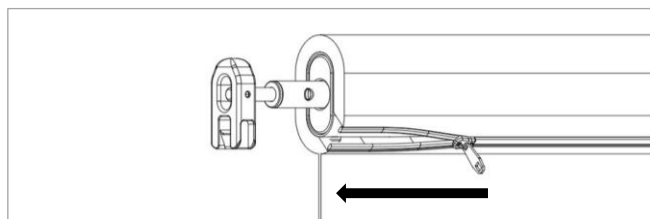


Figure 6.10

Remarque – les barres supérieure et inférieure sont différentes et peuvent être identifiées dans la présentation du produit et dans le tableau au début de cette section.

13. Insérez la barre inférieure dans la fente au bas de la housse en tissu.
14. Installez les poignées de levage aux deux extrémités de la barre supérieure. Faites passer les sangles dans les fentes en haut de la housse en tissu (voir Figure 6.11, Figure 6.12 et Figure 6.13).

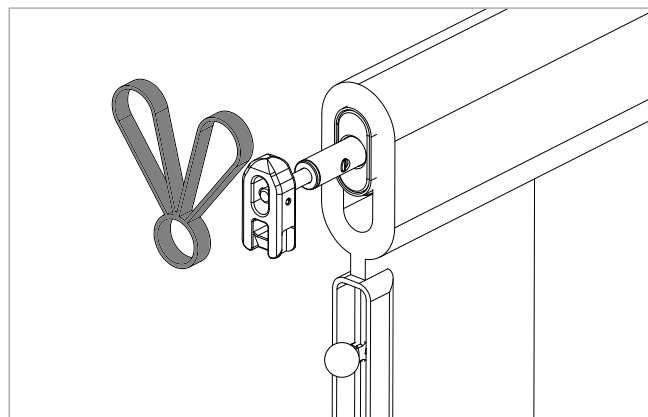


Figure 6.11

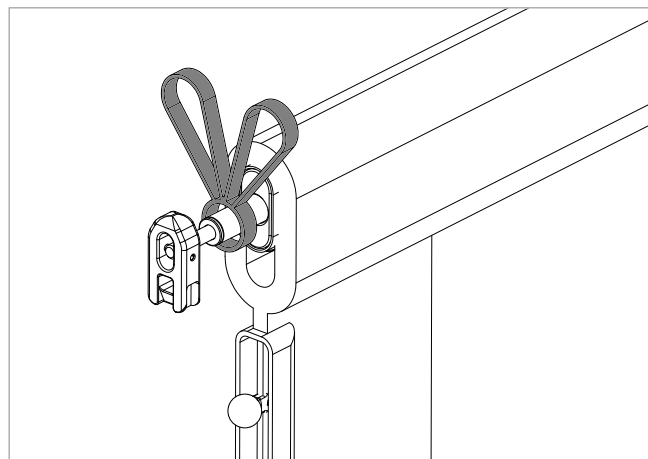


Figure 6.12

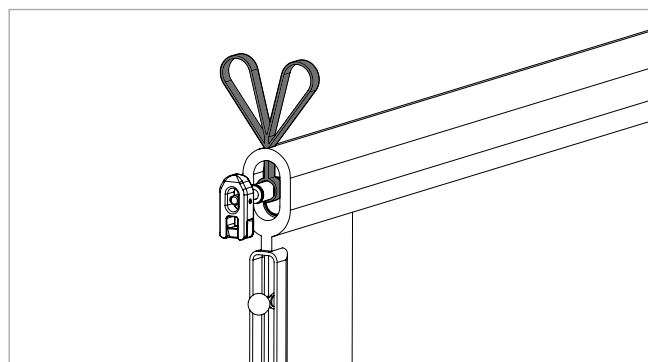


Figure 6.13

15. Insérez le bloc coulissant de la barre supérieure dans le bas du rail de support aux deux extrémités de la barrière (voir Figure 6.14).

Remarque – L'étiquette « Top and Outside » DOIT être sur le dessus et à l'extérieur, c'est-à-dire à l'opposé du lit.

Remarque – Orientation de la barre supérieure comme illustré Figure 6.14 avec l'extrémité coudée du bloc coulissant vers le haut.

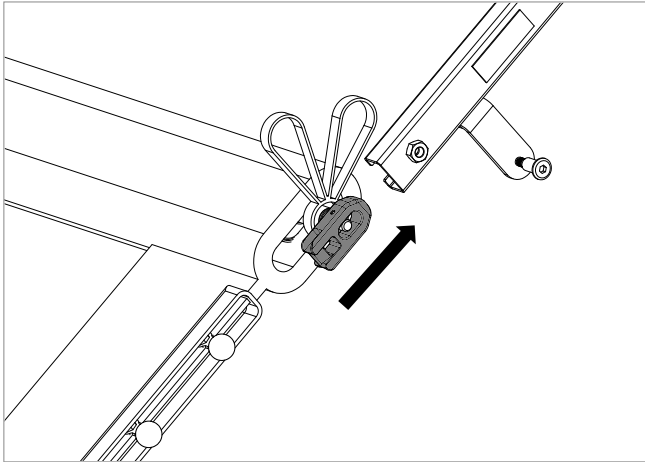


Figure 6.14

Important ! Assurez-vous que TOUT les guides en plastique jaune sont montés dans le rail du support (4 guides en plastique à chaque extrémité de la barrière en tissu) (Voir Figure 6.15)

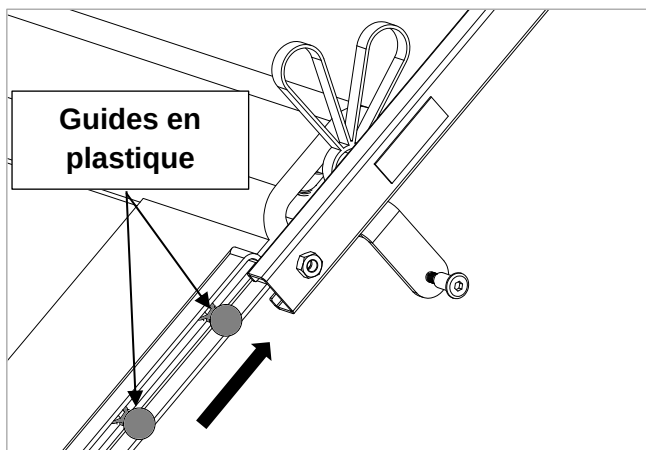


Figure 6.15

16. Insérez le bloc de la barre inférieure dans le rail coulissant aux deux extrémités du rail latéral. Figure 6.16

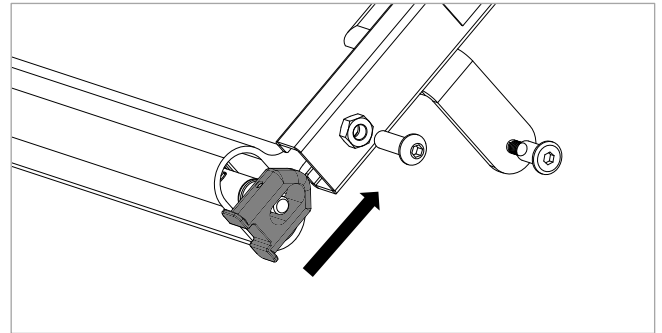


Figure 6.16

Remarque – Orientation de la barre supérieure comme illustré Figure 6.16 avec l'extrémité coudée du bloc coulissant vers le haut.

17. Insérez le boulon de fixation de la barre inférieure M8 x 25 à travers le support et dans le bloc en plastique. Serrez à l'aide d'une clé Allen de 5mm (voir Figure 6.17).

Remarque – le boulon de fixation de la barre inférieure M8 x 25 DOIT être inséré dans le bloc en plastique pour fixer la barre inférieure en place.

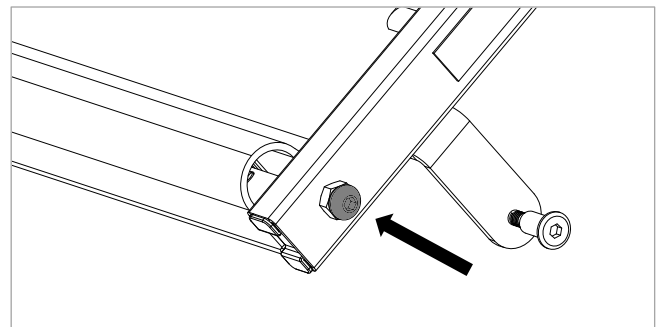


Figure 6.17

Remarque - une fois que le boulon de fixation de la barre inférieure a été installé, assurez-vous que la barre inférieure ne peut pas se déplacer vers le haut ou vers le bas.

18. La barrière est maintenant fixée sur un côté du lit (voir Figure 6.18).

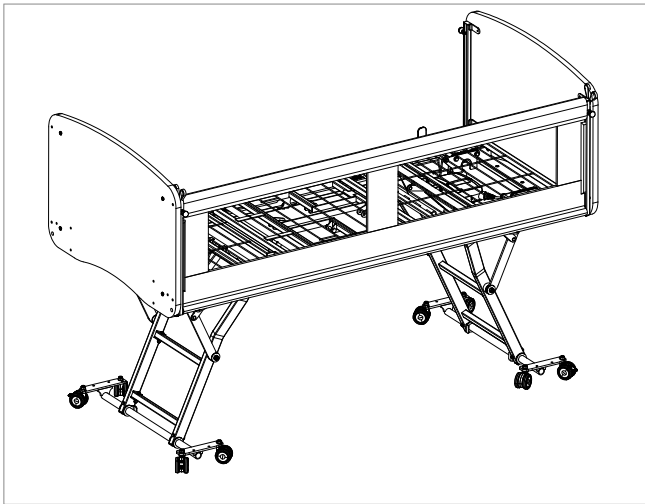


Figure 6.18

19. Répétez les étapes ci-dessus et assemblez la barrière de l'autre côté du lit (voir Figure 6.19).

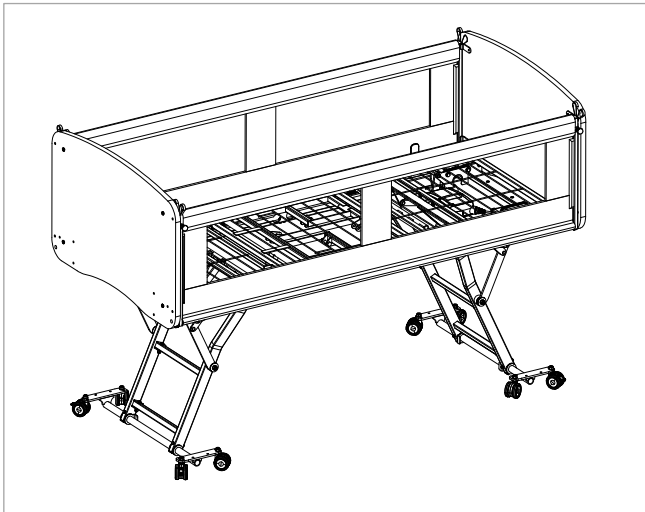


Figure 6.19

20. Effectuez le contrôle de fonctionnalité dans la section 8.

7. Fonctionnement-----



AVERTISSEMENT

Le contrôle de fonctionnement DOIT être effectué par un personnel dûment formé et qualifié.

Serrez toujours les freins lorsque le lit est immobile ou laissé sans surveillance.

La barrière latérale en tissu doit toujours être en position relevée lorsque le patient est seul, à moins qu'une évaluation clinique contraire n'ait été effectuée.

Ne jamais s'asseoir, se tenir debout ou s'accrocher sur les barrières en tissu.

N'attachez rien aux barrières en tissu.

Remarque – lorsque cela est recommandé par une évaluation des risques du patient, les pièces de remplissage du matelas peuvent être utilisées lorsque des barrières latérales sont installées.

Les côtés de lit doivent être relevés ou abaissés d'une extrémité, ou d'un « coin », du lit à la fois.

Pour relever la barrière en tissu depuis sa position basse :

1. Utilisez la poignée de levage pour soulever une extrémité de la barrière (voir Figure 7.1).

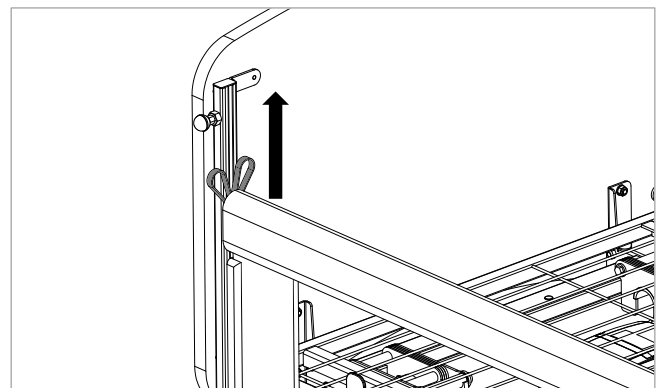


Figure 7.1

2. Fixez la barre supérieure en place à l'aide du piston de verrouillage. Rétractez le piston, relevez la barrière, puis relâchez le piston pour verrouiller la barrière en position relevée (voir Figure 7.2). Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre extrémité de la barrière.

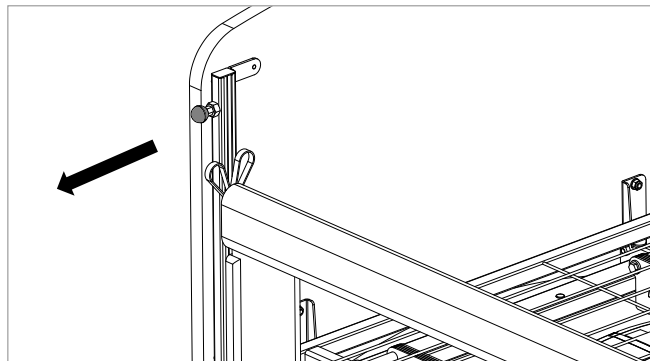


Figure 7.2

3. Assurez-vous que la barrière est correctement relevée et verrouillée en appuyant doucement sur la barre supérieure (voir Figure 7.3).

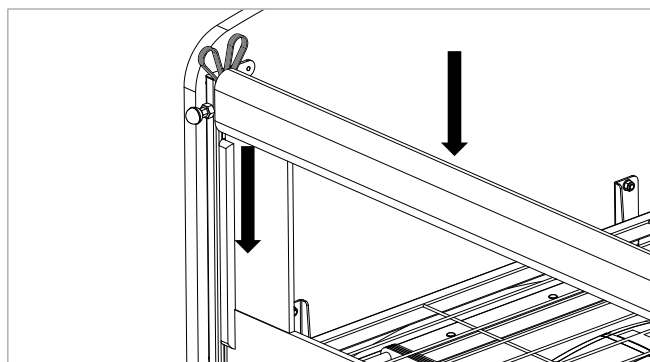


Figure 7.3

Pour abaisser la barrière en tissu :

4. Tirez fermement vers le haut sur la poignée de levage à une extrémité de la barrière (voir Figure 7.4).

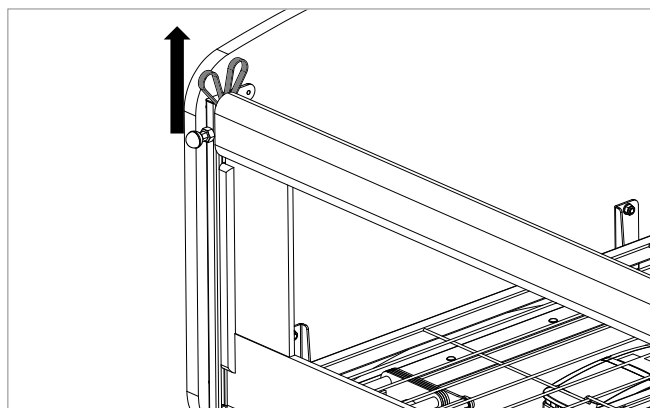


Figure 7.4

5. Rétractez le piston de verrouillage (voir Figure 7.5).

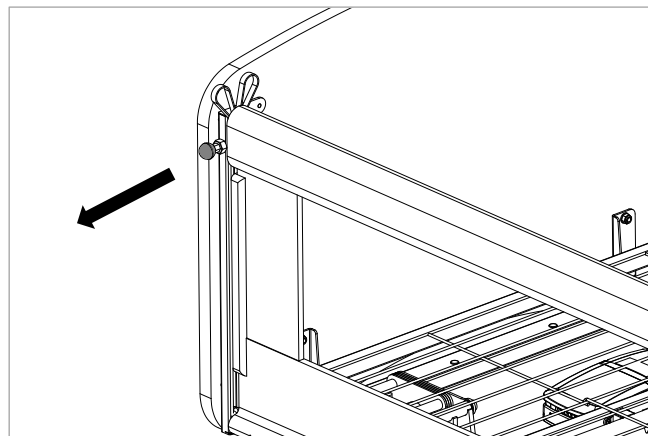


Figure 7.5

6. Abaissez la barrière (voir Figure 7.6). Répétez les étapes 4, 5 et 6 pour l'autre extrémité de la barrière.

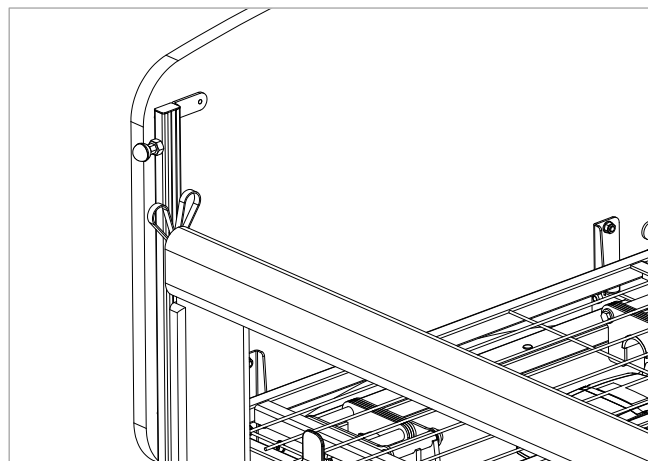


Figure 7.6

7. Assurez-vous que la barrière latérale en tissu est complètement abaissée et que la barre supérieure est sous le niveau du matelas aux deux extrémités.

8. Contrôle de fonctionnement-----



AVERTISSEMENT

Le contrôle de fonctionnement DOIT être effectué par un personnel dûment formé et qualifié.

Serrez toujours les freins lorsque le lit est immobile ou laissé sans surveillance.

1. Assurez-vous que tous les boulons et écrous ont été serrés.
2. Assurez-vous que les pistons de verrouillage fonctionnent correctement.
3. Y a-t-il des espaces ou des cassures dans le tissu, des fils ou des coutures lâches ou cassés ?
4. Assurez-vous que les supports des barrières latérales sont solidement fixés.
5. Tous les câbles électriques (y compris les accessoires, par exemple la pompe à air du matelas) sont-ils fixés et rangés pour éviter les dommages ?
6. **Tous les** patins en plastique (4 à chaque extrémité du tissu du côté) sont-ils installés le long du rail latéral ?
7. La barre inférieure est-elle sécurisée et incapable de se déplacer vers le haut ou vers le bas ?
8. Les zips sont-ils complètement fermés ?
9. L'étiquette « Top and Outside » est-elle opposée au lit ?
10. Des poignées de levage sont-elles montées à chaque extrémité de chaque barrière ?
11. Soulevez la barrière en tissu et assurez-vous qu'elle s'enclenche en position supérieure. Appuyez doucement sur la barre supérieure pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée.
12. Abaissez la barrière latérale en tissu et assurez-vous qu'elle s'abaisse de manière à ce que les deux extrémités soient sous le niveau du matelas.
13. Lorsqu'un matelas spécial ou un surmatelas est utilisé et que la distance entre le haut du matelas non comprimé et le haut de la barrière, le cas échéant, est inférieure à 220 mm/8,7 pouces, une évaluation des risques doit être effectuée pour assurer une sécurité équivalente.

9. Nettoyage et désinfection -----



AVERTISSEMENT

Le lit doit être déconnecté de l'alimentation électrique lorsqu'il est nettoyé ou désinfecté.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées par une personne compétente après le nettoyage ou la désinfection.

Le lit et les accessoires DOIVENT être nettoyés et désinfectés avant de réutiliser le lit pour un autre patient.

Informations relatives au nettoyage :

Pour désinfecter le lit et les accessoires :

- N'utilisez que des détergents conçus pour un usage médical.
- N'utilisez pas d'abrasifs, d'éponges à récurer ou d'autres matériaux qui pourraient endommager le revêtement.
- N'utilisez pas de produits corrosifs, caustiques ou acides puissants.
- Ne pas utiliser de détergents qui pourraient altérer la structure ou le comportement des plastiques (essence etc.).
- Nettoyez en essuyant avec un chiffon humide.

Le lit et les accessoires ne sont pas conçus pour l'entretien dans les lave-lits automatiques ou pour le nettoyage à l'eau sous pression, au jet, à la douche ou à la vapeur.

Accora ne peut être tenu responsable de quelconque dommage ou risque de dommage en cas d'utilisation d'agents nettoyants ou désinfectants inappropriés.

Le nettoyage doit être effectué à intervalles réguliers, déterminés par l'établissement. Le lit et les accessoires doivent être nettoyés entre chaque patient.

Le matériau PU peut être lavé jusqu'à 40 degrés Celsius sur un programme en machine à laver délicat ou à la main. Ne pas javelliser, passer au sèche-linge ou repasser. Veuillez consulter le guide ci-dessous.



10. Procédure de nettoyage-----

1. Retirez les barrières en tissu du lit et nettoyez-les séparément.
2. Si nécessaire (par exemple entre les patients), retirez les supports de la barrière latérale en tissu et nettoyez-les séparément.
3. Procédez comme décrit dans la section « Informations sur le nettoyage » ci-dessus.

11. Stockage-----

Nos recommandations pour un stockage sans problème :

1. Débranchez le lit de l'alimentation électrique.
2. Retirez les accessoires.
3. Emballez les accessoires ou couvrez-les de manière à ne pas endommager le revêtement et les pièces en plastique.
4. Les accessoires doivent être stockés à une température comprise entre -10°C et +50°C.
5. Les accessoires doivent être stockés dans une humidité relative (sans condensation) comprise entre 20% et 80%.

12. Inspection quotidienne -----

Une inspection visuelle quotidienne est fortement recommandée et peut être effectuée par le personnel soignant, l'utilisateur ou une autre personne.

Les points suivants doivent être contrôlés :

1. Les pistons de verrouillage sont-ils verrouillés en position ?
2. Y a-t-il des signes de mauvaise utilisation ou d'usure excessive ?
3. Tous les appareils et accessoires sont-ils bien serrés et sécurisés ?
4. Y a-t-il des espaces ou des cassures dans le tissu, des fils ou des coutures lâches ou cassés ?
5. Y a-t-il des risques de piégeage ou de blessure du patient ?
6. Assurez-vous que les quatre guides en plastique jaune à chaque extrémité de la barrière sont dans le support de barrière.
7. Les zips sont-ils complètement fermés ?
8. L'étiquette « Top and Outside » est-elle opposée au lit ?
9. La barre inférieure est-elle sécurisée et incapable de se déplacer vers le haut ou vers le bas ?
10. La barrière en tissu est-elle stable et sécurisée ? En position relevée, appuyez doucement sur la barre supérieure pour vous assurer qu'elle est bien fixée.
11. La barrière latérale en tissu est-elle installée conformément aux instructions ?
12. Tous les câbles électriques (y compris les accessoires, par exemple, la pompe à air du matelas) sont-ils fixés et rangés de manière à éviter tout dommage ?

Si un dommage, un problème de performance ou un sujet de préoccupation est constaté au cours de cette inspection, le kit doit être retiré du service et des mesures appropriées doivent être prises.

13. Entretien général-----



AVERTISSEMENT

Le montage DOIT être effectué par du personnel dûment formé et qualifié.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées après assemblage par une personne dûment formée et qualifiée.

Ne procédez pas à l'entretien lorsque l'utilisateur du service ou le patient est dans le lit.

Les réparations du lit doivent être effectuées par du personnel dûment formé et qualifié.

14. Garantie -----

Les Siderails en tissu ont une période de garantie de 2 ans.

15. Mise au rebut-----

En cas de mise au rebut des matériaux du lit, les pièces en fin de vie doivent être traitées conformément aux réglementations environnementales en vigueur.

16. Tableau des symboles -----

	Avertissement général
	Mise en garde générale
	Conforme au règlement européen sur les dispositifs médicaux 2017/745
	Numéro de modèle
	Numéro de série
	Date de fabrication
	Fabricant
	Dispositif médical conforme au règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux 2017/745
	Se référer aux instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit
	Destiné à un usage en intérieur uniquement
	Représentant CE
Top bar 200cm	Barre supérieure 2000mm
Bottom bar 200cm	Barre inférieure 2000mm



Orientation de montage et avertissement

17. Coordonnées de contact-----

	Royaume-Uni et reste du monde	États-Unis
Adresse	Accora Ltd. Charter House Barrington Road Orwell Cambridge SG8 5QP UK	Accora Inc. 9210 Corporate Blvd. Suite 120 Rockville MD 20850 USA
Téléphone	+44 (0)1223 206100	+1 301-560-2400
E-mail	info@accora.care	information@accora.care
Site internet	www.accora.care	

Cette page est laissée blanche

Accora



Accora
Barrington Road
Orwell
Cambridge
SG8 5QP
United Kingdom

T : +44 (0)1223 206100
info@accora.care
www.accora.care

IFU-FL6-006FR Rev 01