

Barrières latérales du FloorBed 1

IFU-FL1-008FR RÉV 02

Table des matières

Titre	Page
Bienvenue	2
Avertissements généraux	3
1. Moyen de livraison	3
2. Consignes de sécurité	3
3. Utilisation prévue	3
4. Spécification technique	4
5. Accessoires et pièces de rechange	4
6. Montage et fixation	4
7. Utilisation des barrières latérales	8
8. Contrôle des fonctionnalités	10
9. Nettoyage et désinfection	10
10. Dépannage	10
11. Stockage	10
12. Garantie	11
13. Élimination	11
14. Inspection quotidienne	11
15. Entretien général	11
16. Tableau des symboles	11
17. Coordonnées	11

Translated from IFU-FL1-008 EN REV 04

Les barrières latérales du FloorBed 1 sont classées en tant que dispositif médical de classe 1 conformément au Règlement européen sur les dispositifs médicaux 2017/745.



Avis aux utilisateurs

Si un incident grave se produit en rapport avec ce dispositif médical, affectant l'utilisateur ou le patient, alors l'utilisateur ou le patient doit signaler l'incident grave au fabricant (ou distributeur) du dispositif médical et, dans l'Union européenne, l'utilisateur doit également signaler l'incident grave à l'autorité compétente de l'État membre où il se trouve.

EC REP

Accora Ltd, 38 Main Street,
Swords, Co. Dublin, Irlande, K67 E0A2
T : +353 (0)1 695 0614

Bienvenue

Cher/chère client(e),

Merci d'avoir acheté un produit de santé Accora. Avant d'utiliser le lit, vous devez lire et comprendre toutes les instructions de ce manuel. Toute utilisation ou manipulation du lit doit être effectuée conformément aux instructions de ce manuel.

Veuillez vous assurer que le manuel est à la disposition des utilisateurs et des opérateurs pendant toute la durée de vie du lit. Contactez-nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Voir la section 17 pour les coordonnées de contact spécifiques par région.

Ce manuel d'instructions s'applique aux Barrières latérales du FloorBed 1.

Les barrières latérales du FloorBed 1 sont conçues pour être utilisées par les patients qui ont un FloorBed 1.

Avant d'utiliser cet accessoire, vous devez lire et bien comprendre ce manuel d'instructions. Toutes les utilisations et manipulations des barrières latérales du FloorBed 1 doivent être effectuées conformément aux instructions de ce manuel.

Toute action incompatible avec ce manuel d'instructions est effectuée à vos propres risques et Accora ne sera pas responsable de toute blessure ou dommage. Veuillez vous assurer que ce manuel d'instructions est disponible pour les utilisateurs, les soignants, les opérateurs et les patients pendant toute la durée de vie des barrières latérales du FloorBed 1.

Les barrières latérales du FloorBed 1 doivent être régulièrement vérifiées par l'utilisateur, le soignant, l'opérateur ou le patient pour s'assurer que la configuration est correcte et fonctionne comme prévu.

Politique de conception et propriété intellectuelle

® Et ™ sont des marques commerciales appartenant à Accora Ltd, sauf indication contraire. Appliquant une politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les conceptions sans préavis. © Accora Ltd 2020.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

1. Conservez ce manuel d'instructions.
2. Ces instructions doivent être respectées pour garantir l'utilisation sûre et efficace des barrières latérales du FloorBed 1 et la sécurité des utilisateurs et des soignants.
3. Les barrières latérales du FloorBed 1 doivent être assemblées, positionnées et utilisées conformément à ces instructions.
4. Les barrières latérales du FloorBed 1 ne doivent pas être exposées à la fumée, aux flammes nues, aux températures extrêmes, aux gaz inflammables ou à d'autres substances ou situations dangereuses.
5. Accora ne peut être tenu responsable des dommages, blessures ou accidents résultant de modifications non autorisées, de pièces de rechange non authentiques, de négligence ou d'une utilisation non conforme à ce manuel pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.
6. N'utilisez que des barrières latérales et autres accessoires compatibles avec ce lit fournis par Accora. Des barrières incompatibles peuvent créer de graves dangers.
7. Tenez les enfants (autres que le patient) et les animaux à l'écart de ce lit, sauf sous la surveillance d'un adulte, car il existe un risque de blessure et/ou d'étouffement avec les petites pièces.
8. Lors du raccordement d'autres équipements électroniques utilisés avec le lit (par exemple, une pompe à matelas pneumatique), assurez-vous que les câbles ne peuvent pas être pincés, écrasés ou endommagés par les équipements mobiles du lit, notamment les barrières latérales.
9. Ne jamais s'asseoir, se tenir debout ou s'accrocher aux barrières latérales.
10. Le montage et l'installation DOIVENT être effectués par du personnel dûment formé et qualifié.
11. Ne modifiez pas les barrières du FloorBed 1.
12. Les patients, ou les utilisateurs, doivent subir une évaluation des risques pour s'assurer qu'ils sont capables de comprendre ce manuel et d'utiliser les barrières latérales du FloorBed en toute sécurité sans risque pour eux-mêmes ou pour les autres.
13. Si le poids combiné du matelas et des accessoires dépasse 35 kg, le poids maximum autorisé pour le patient sur le lit doit être réduit en conséquence.
14. Ne fixez rien aux barrières latérales, par exemple la pompe à air du matelas.
15. N'installez pas les barrières latérales lorsqu'un utilisateur est dans le lit. L'utilisateur doit être transféré hors du lit avant de monter les barrières latérales.
16. Les barrières latérales ne doivent pas être utilisées pour la contention d'un patient. Les risques pour les patients doivent être évalués par un clinicien qualifié.
17. Lorsqu'un matelas spécial ou un surmatelas est utilisé et que la distance entre le haut du matelas non comprimé et le haut de la barrière, le cas échéant, est inférieure à 220 mm/8,7 pouces, une évaluation des risques doit être effectuée pour assurer une sécurité équivalente.

1. Moyens de livraison

Les barrières latérales du FloorBed 1 sont fournies démontées.

Les barres, les supports et le tissu doivent être assemblés et montés sur un lit de soin FloorBed 1.

Une inspection doit avoir lieu à la réception pour s'assurer que la livraison est complète et non endommagée.

Toute pièce manquante, défaut ou dommage doit être signalé immédiatement au transporteur et à Accora par écrit.

Lors du déplacement des barrières latérales du FloorBed 1, du chargement ou du déchargement, il faut veiller à ce qu'aucune pièce ne soit perdue ou endommagée.

2. Consignes de sécurité

1. Le montage et l'installation DOIVENT être effectués par du personnel dûment formé et qualifié.
2. Avant d'utiliser les barrières latérales du FloorBed 1, vous devez lire ce manuel d'instructions et utiliser cet appareil conformément à celui-ci.
3. Les barrières latérales du FloorBed 1 ne DOIVENT pas être utilisées si des défauts ont été détectés qui pourraient blesser le patient, le personnel ou une tierce personne, ou endommager le FloorBed 1, les barrières latérales du FloorBed 1 ou les environs.
4. Avant d'utiliser les barrières latérales du FloorBed 1, l'opérateur DOIT comprendre les barrières latérales et leur fonctionnalité.
5. Les barrières latérales du FloorBed 1 ne sont pas destinées à supporter des charges.
6. Lors de l'utilisation des barrières latérales du FloorBed 1 ou des parties mobiles du lit, veillez à ce que ni le patient, ni d'autres personnes ou objets ne soient coincés.
7. Lors de la réparation des barrières latérales du FloorBed 1, seuls les matériaux et composants d'origine fournis par Accora peuvent être utilisés.
8. Les barrières latérales du FloorBed 1 doivent être inspectées quotidiennement.
9. Les barrières latérales du FloorBed 1 ne doivent être montées qu'après une évaluation clinique de l'utilisateur ou du patient.

3. Utilisation prévue

Les barrières latérales du FloorBed 1 ne peuvent être utilisées qu'avec FloorBed 1, FloorBed 1 Junior ou FloorBed 1 Plus.

Sous réserve d'une évaluation des risques, les barrières latérales peuvent contribuer à créer un environnement plus sûr pour l'utilisateur du lit.

4. Spécifications techniques

Informations environnementales :

Condition	Plage de températures	Humidité relative	Pression atmosphérique
Utilisation	- 10°C à + 40°C + 50 °F à + 104 °F	30 % à 75 %	700 hPa à 1 060 hPa
Transport/stockage	- 20 °C à + 50 °C - 4 °F à + 122 °F	(Sans condensation)	

Si les barrières du FloorBed 1 sont stockées dans des conditions hors de la plage de fonctionnement normale, il faut leur laisser le temps de se stabiliser, dans des conditions de fonctionnement normales, avant de les utiliser.

Description	Valeur
Dimensions extérieures	2000 L x 500 H x 50 L mm (version standard) 2200 L x 500 H x 50 L mm Version étendue
Charge maximale autorisée pour les barrières latérales du FloorBed 1	75 kg
Matériel	Tissu PU et acier doux
Poids total de l'ensemble de barrières latérales	16,8 kg
Durée de vie	5 ans

Les barrières latérales du FloorBed1 sont disponibles en deux longueurs et sont fournies en kit comprenant deux/trois éléments.

Numéro de pièce / Description	Le kit comprend
Kit de barrières latérales standard de 2000 mm SDR-0-FL1-100 Convient aux patients adultes de 1,46 m et plus	SDRBR-0-FL1-200 + FABKIT-0-CB1-000 OU SDRBR-0-FL1-200 + SDRFAB-0-FL1-100 + SDRMET-0-FL1-100
Kit de barrières latérales étendues de 2200 mm SDREX-0-FL1-100 Convient aux patients adultes de 1,46 m et plus	SDRBR-0-FL1-200 + FABEXKIT-0-CB1-000 OU SDRBR-0-FL1-200 + SDRFABEX-0-FL1-100 + SDRMETEX-0-FL1-100
Kit de barrières latérales standard de 2000 mm avec traverse SDR-0-FL4-000 Convient aux enfants dont la taille est comprise entre 75 cm et 1,55 m, uniquement avec le FloorBed 1 Junior : NSB-0-FL1-200 + Pare-chocs pour tête et pied de lit BMHNE-0-FL4-000 + Manchon de sécurité SLE-0-FL4-000	SDRBR-0-FL4-000 + FABKIT-0-FL4-000 OU SDRBR-0-FL4-000 + SDRFAB-0-FL4-100 + SDRMET-0-FL1-100

5. Accessoires et pièces de rechange

Description	Code commande
Remplissage de matelas du FloorBed	MTINF-0-FL1-000
Jeu de supports de fixation pour les barrières latérales (pour 2000 et 2200 mm)	SDRBR-0-FL1-200
Jeu de fixation pour barrières latérales avec mitre	SDRBR-0-FL4-000
Lot de tissu et de barres de 2000 mm	FABKIT-0-CB1-000
Lot de tissu et de barres de 2200 mm	FABEXKIT-0-CB1-000
Tissu de 2000 mm avec ensemble de traversins et de barres	FABKIT-0-FL4-000
Lot de tissu de 2000 mm	SDRFAB-0-FL1-100
Lot de tissu de 2200 mm	SDRFABEX-0-FL1-100
Lot de tissu de 2000 mm avec traversin	SDRFAB-0-FL4-100
Ensemble de barres de 2000 mm	SDRMET-0-FL1-100
Ensemble de barres de 2200 mm	SDRMETEX-0-FL1-100
Kit de fixation des support des barrières latérales	SDRKIT1-0-FL1-000
Kit de fixation du tissu des barrières latérales	SDRKIT2-0-FL1-000
Sangle latérale	SDRPLST-0-FL1-000

6. Assemblage et montage

AVERTISSEMENT

Le montage DOIT être effectué par du personnel dûment formé et qualifié.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées après montage par une personne dûment formée et qualifiée.





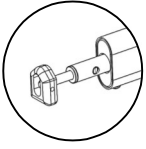
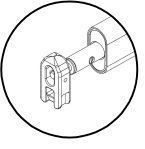

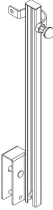
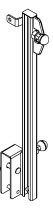





Le montage DOIT avoir lieu dans un endroit clair et dégagé ; les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart.

N'installez pas les barrières latérales lorsqu'un utilisateur est dans le lit. L'utilisateur doit être transféré hors du lit avant de monter les barrières latérales.

Lorsqu'un matelas spécial ou un surmatelas est utilisé et que la distance entre le haut du matelas non comprimé et le haut de la barrière, le cas échéant, est inférieure à 220 mm/8,7 pouces, une évaluation des risques doit être effectuée pour assurer une sécurité équivalente.


- Vérifiez si le lit a subi des dommages visibles pendant le transport et que la livraison est complète.
- Vous aurez besoin des outils suivants pour assembler et installer les barrières latérales du FloorBed 1 :
 - Clés Allen de 4 mm et 5 mm
 - Clé plate de 10 mm

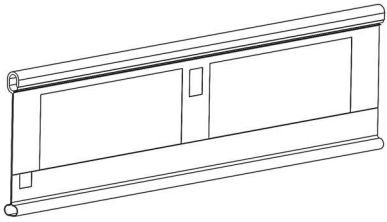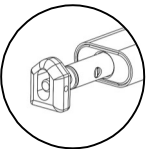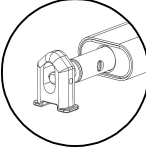3. Identifiez tous les composants :

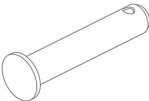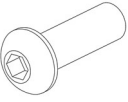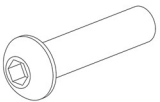Housse en tissu Quantité 2	
Barre inférieure Quantité 2 Il existe deux types de blocs. L'un ou l'autre peut être indiqué dans ce manuel	  Ancien type 
Barre Supérieure Quantité 2 Il existe deux types de blocs. L'un ou l'autre peut être indiqué dans ce manuel	  Ancien type 
Barrières latérales Quantité 4	 OU 
Poignée de levage Quantité 4	
CLIP R Quantité 4	
Broche (50 mm) Quantité 4	
Vis de fixation de la barre inférieure (25 mm) Quantité 4	
Vis de fixation du support (35 mm) Quantité 4	

Remarque - Tout au long de ce manuel d'utilisation, le côté gauche et le côté droit du lit sont décrits du point de vue d'un patient allongé dans le lit.



Côté tête

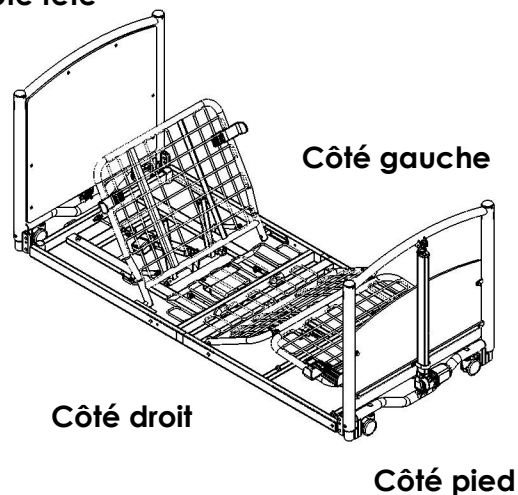



Remarque - Les instructions suivantes décrivent le montage d'un support de barrières latérales sur le côté droit du lit du côté pied.

Remarque - Si le pare-chocs BMHNE-0-FL4-000 est utilisé, il doit être installé sur le lit avant les barrières latérales.

- Retirez le boulon et l'écrou de fixation du repose-pied supérieur comme indiqué ci-dessous à l'aide d'une clé Allen de 4 mm et d'une clé de 10 mm.

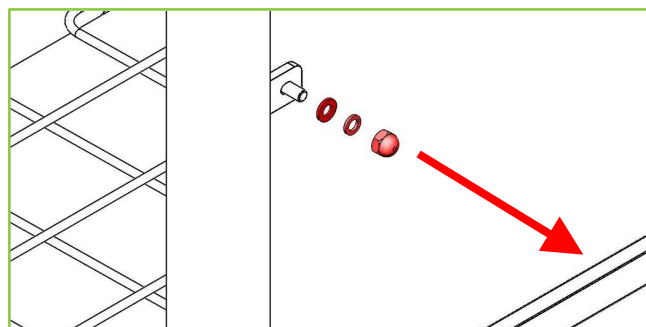
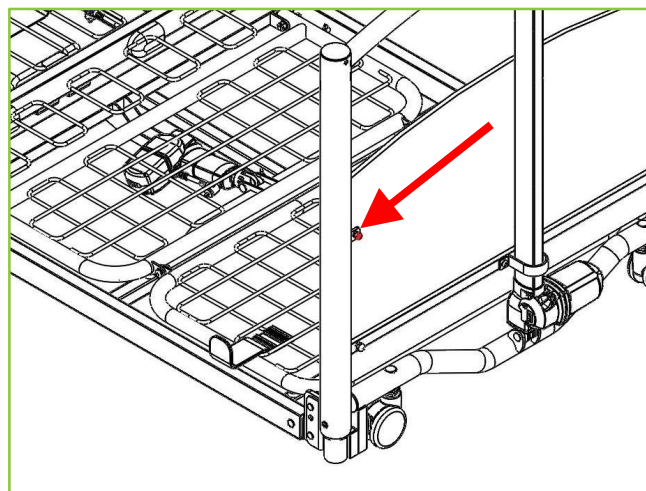


5. Retirez la goupille du sommier et le clip R.

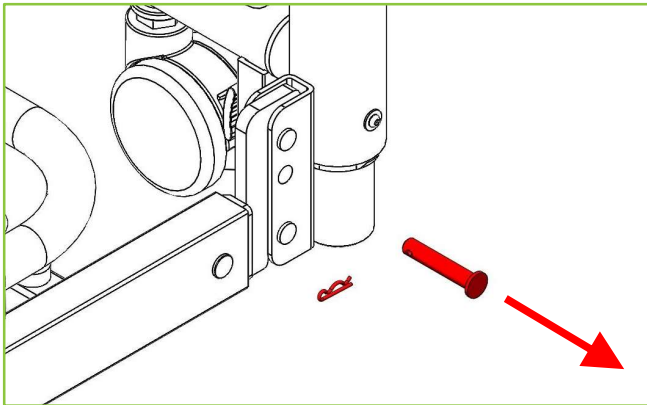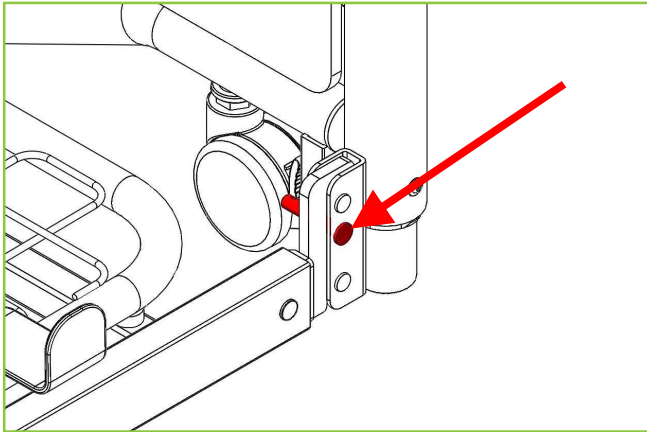


Remarque – Cette broche ne sera pas nécessaire pour ajuster les barrières latérales. Stockez en toute sécurité pour une utilisation ultérieure si les barrières latérales sont retirées.

6. Retirez les deux vis, la goupille de verrouillage et le clip R du support des barrières latérales.
7. Montez le support à partir du haut et faites-le glisser vers le bas en position.

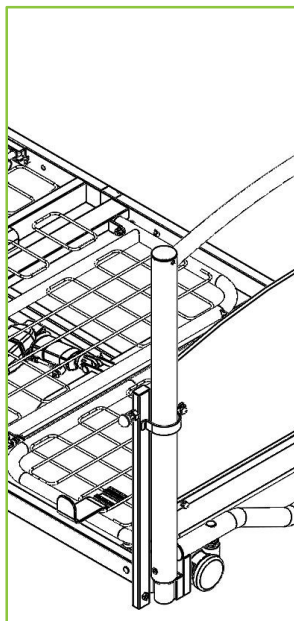
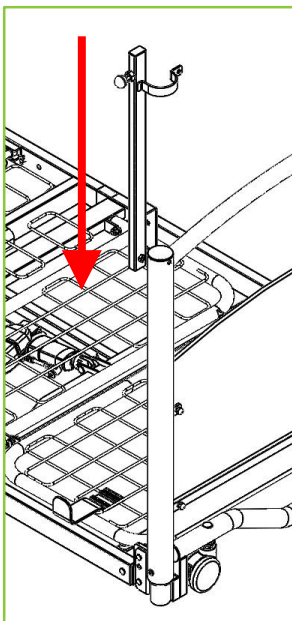


Remarque – Si des pare-chocs sont installés, le support ne peut pas être glissé vers le bas du support de lit tubulaire. Localisez la base du support sur le sommier, puis positionnez la partie incurvée du support contre la tête de lit.


8. Alignez le trou de la goupille de verrouillage des barrières latérales et le trou de la goupille de verrouillage du sommier.

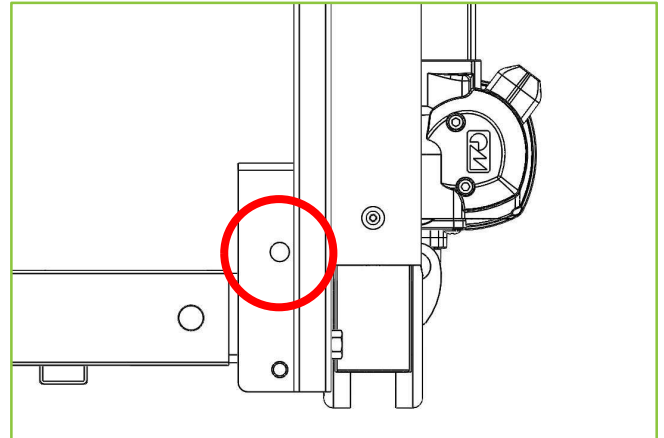


9. Montez la goupille de verrouillage et le clip R (50 mm de long, fourni avec les barrières latérales).

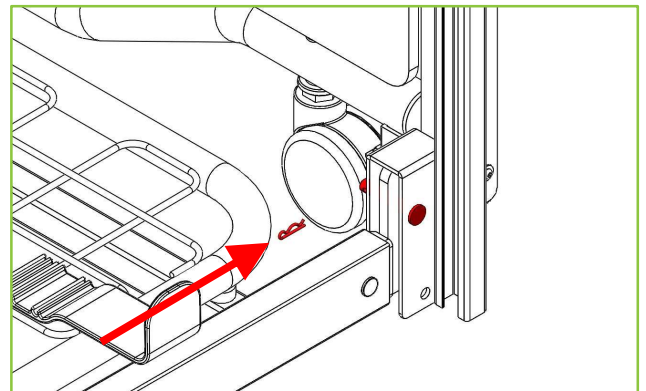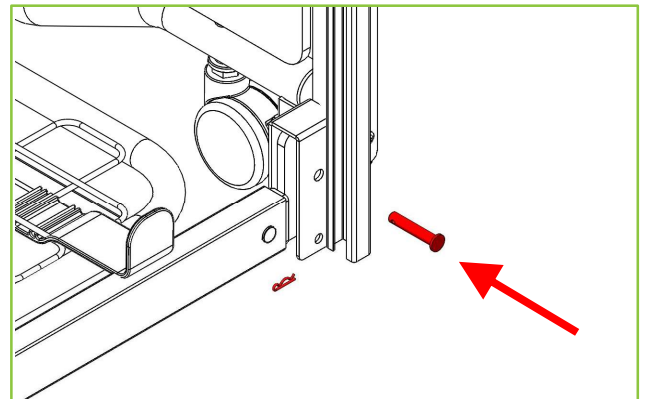


10. Montez la vis de fixation du support (35 mm de long) à l'aide d'une clé Allen de 5 mm.

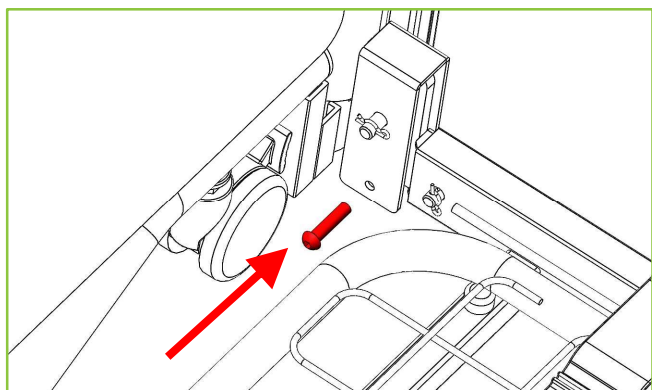

11. Alignez le trou de la partie incurvée du support avec le trou dans le repose-pieds.

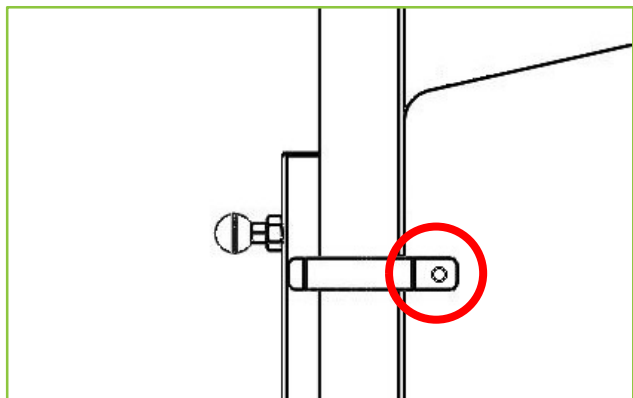


12. Placez le boulon et l'écrou de fixation du repose-pied supérieur comme indiqué ci-dessous à l'aide d'une clé Allen de 4 mm et d'une clé de 10 mm. Si le pare-chocs BMHNE-0-FL4-000 est installé, assurez-vous qu'aucun matériau n'est pincé dans le support.

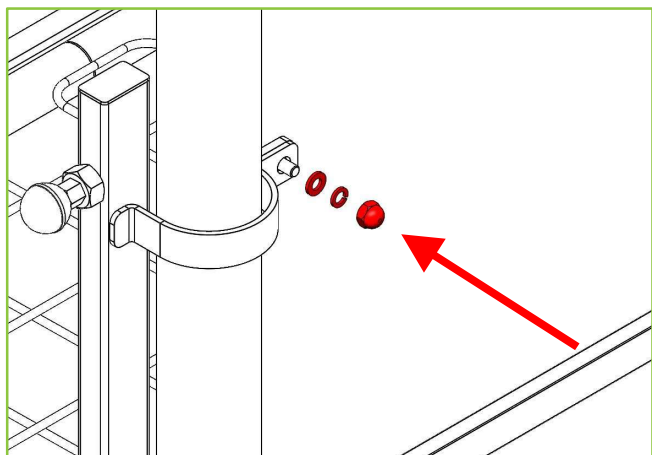


13. Ce support est maintenant en place. Répétez le processus ci-dessus pour installer un support de barrières latérales sur le côté droit du lit du côté tête.

14. Retirez l'une des housses en tissu des barrières latérales de son emballage et étalez-la sur une surface plane avec les étiquettes vers le haut. (Étiquette « Top and Outside » vers le haut.)
15. Insérez la barre supérieure et fermez la fermeture éclair du rabat supérieur de la housse en tissu.

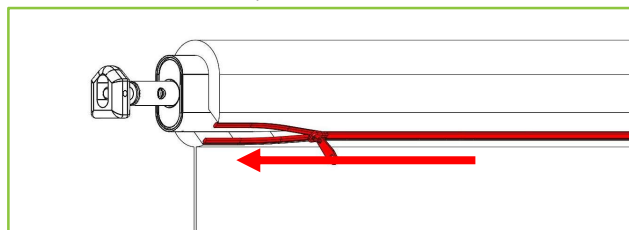

Remarque – les barres supérieure et inférieure sont différentes et peuvent être identifiées comme indiqué au paragraphe 3 de la section 6.


16. Insérez la barre inférieure dans la fente au bas de la housse en tissu.
17. Installez les poignées de levage aux deux extrémités de la barre supérieure. Faites passer les sangles dans les fentes en haut de la housse en tissu.

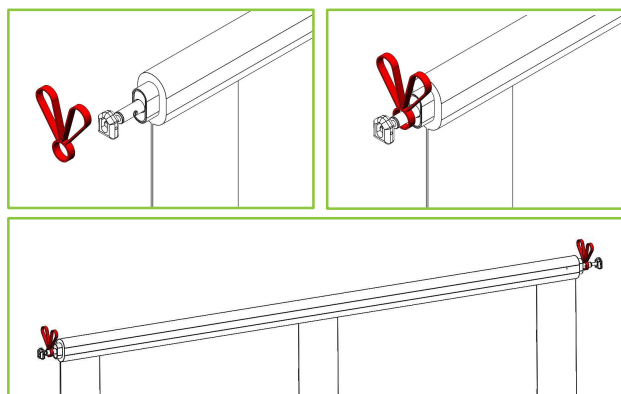


18. À l'aide de la télécommande, montez le FloorBed à au moins 20 cm du sol.
19. Insérez la barre supérieure dans le bas de la glissière aux deux extrémités des barrières latérales.

Remarque – L'étiquette « Top and Outside » DOIT être sur le dessus et à l'extérieur, c'est-à-dire à l'opposé du lit. La traverse intégrale sur SDR-0-FL4-000 doit être à l'intérieur du lit.

Remarque – Orientation de la barre supérieure comme illustré avec l'extrémité en forme d'angle du bloc coulissant vers le haut.

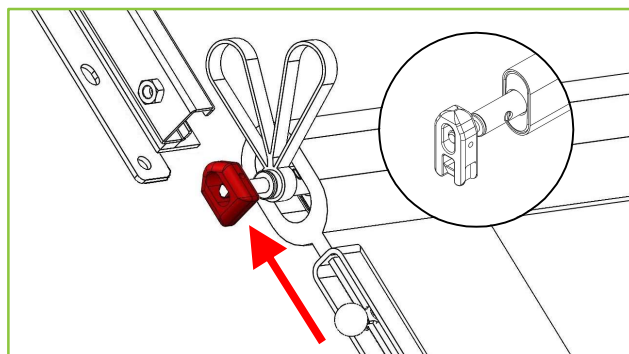


20. **Important !** Assurez-vous que **TOUS** les guides en plastique sont montés dans la glissière. (4 guides en plastique à chaque extrémité du tissu des barrières latérales)

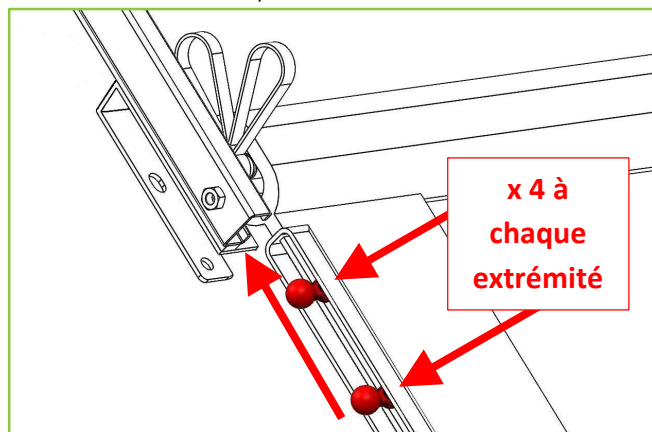

Remarque – Les barrières latérales SDR-0-FL4-000 disposent d'un piston de verrouillage supplémentaire à la base du support. Tirez sur ce piston pour déplacer les barres vers le haut de la glissière.


21. Insérez la barre inférieure dans le rail coulissant aux deux extrémités des barrières latérales.

Remarque – Orientation de la barre supérieure comme illustré avec l'extrémité en forme d'angle du bloc coulissant vers le haut.

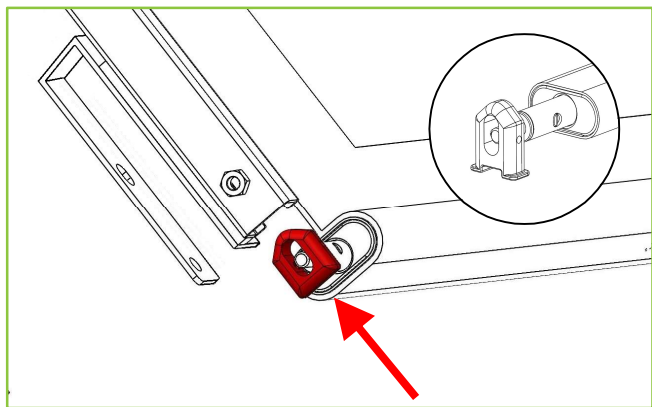


22. Montez la vis de fixation de la barre inférieure (25 mm de long) à l'aide d'une clé Allen de 5 mm.

Remarque – la vis de fixation de la barre inférieure (25 mm de long) **DOIT** être montée dans le bloc coulissant pour fixer la barre inférieure.

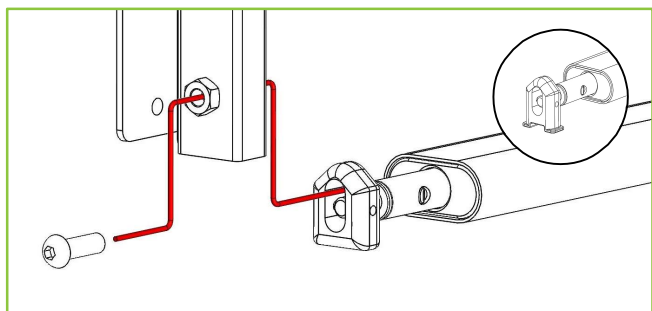


Remarque – une fois que la vis de fixation de la barre inférieure a été installée, assurez-vous que la barre inférieure ne peut pas se déplacer vers le haut ou vers le bas.

23. La barrière est maintenant fixée sur un côté du lit.

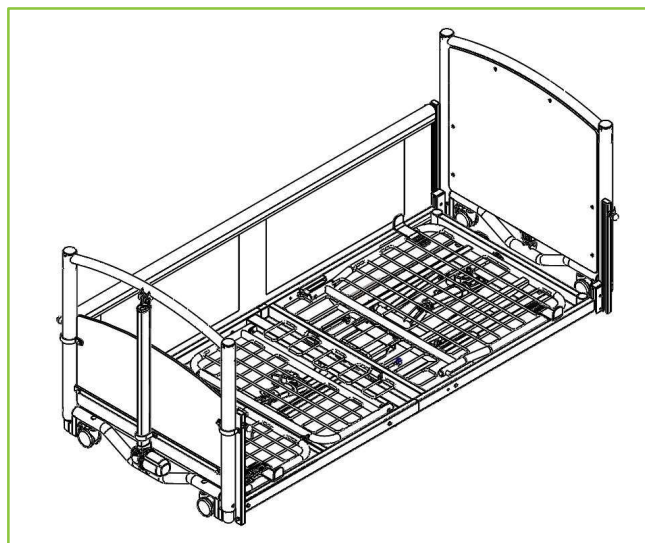

24. Répétez le processus d'assemblage de la barrière de l'autre côté du lit.

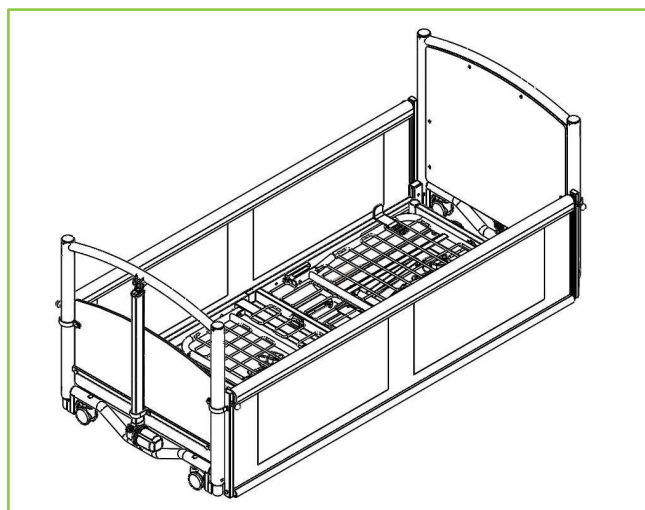

7. Utilisation des barrières latérales

AVERTISSEMENT

Les patients, ou les utilisateurs, doivent subir une évaluation des risques pour s'assurer qu'ils sont capables de comprendre ce manuel et d'utiliser les barrières latérales du FloorBed en toute sécurité sans risque pour eux-mêmes ou pour les autres.


Les barrières latérales doivent toujours être en position levée lorsque le patient ou l'utilisateur est seul ou sans surveillance, sauf si une évaluation clinique a été effectuée et indique le contraire.

Ne jamais s'asseoir, se tenir debout ou s'accrocher aux barrières latérales. Ne fixez rien aux barrières latérales, par exemple la pompe à air du matelas.

Remarque: Lorsque cela est recommandé par une évaluation des risques pour le patient, des éléments de remplissage de matelas du FloorBed peuvent être utilisés lorsque des barrières latérales sont installées (sauf SDR-0-FL4-000 où la traverse fait partie de la barrière). Les côtés de lit doivent être relevés ou abaissés d'une extrémité, ou d'un « coin », du lit à la fois.


Pour monter les barrières latérales :

1. Utilisez la poignée de levage pour monter la barrière. Si SDR-0-FL4-000 est installé, tirez d'abord sur le piston inférieur pour libérer la barre supérieure.

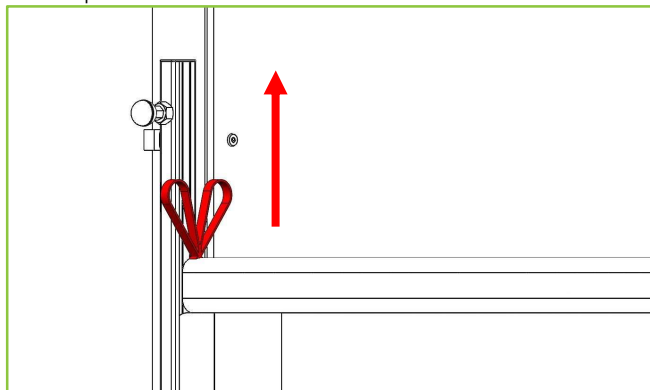


2. Fixez la barre supérieure en place à l'aide du piston de verrouillage. (Vous pouvez rétracter le piston, soulever les barrières latérales, puis relâcher le piston pour verrouiller les barrières latérales en position levée)

1. Rétractez le piston de verrouillage
2. Montez la barrière latéral
3. Relâchez le piston de verrouillage

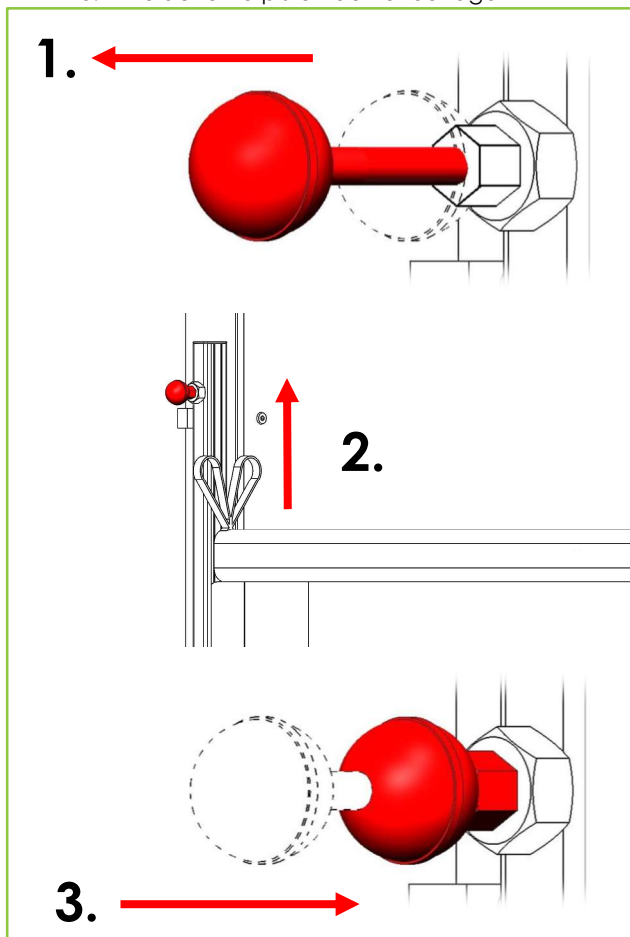


3. Assurez-vous que les barrières latérales sont correctement levées et verrouillées en poussant doucement vers le bas.

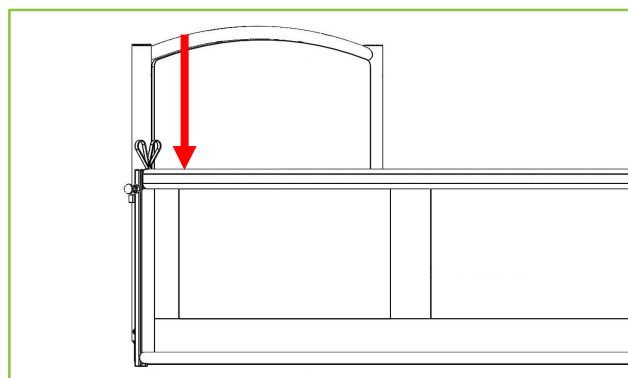


Pour abaisser les barrières latérales :


1. Tirez fermement vers le haut sur la poignée de levage.

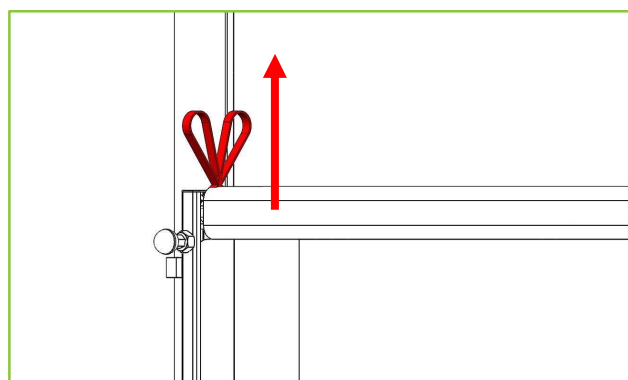


2. Rétractez le piston de verrouillage

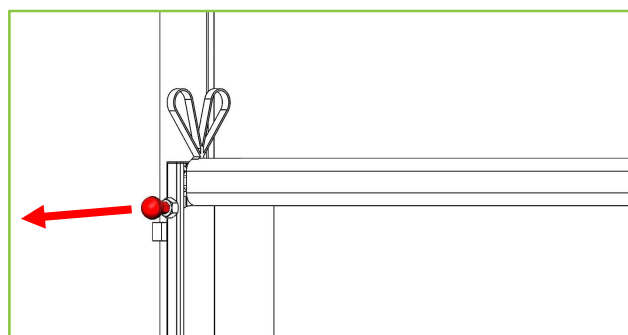

3. Abaissez les barrières latérales.

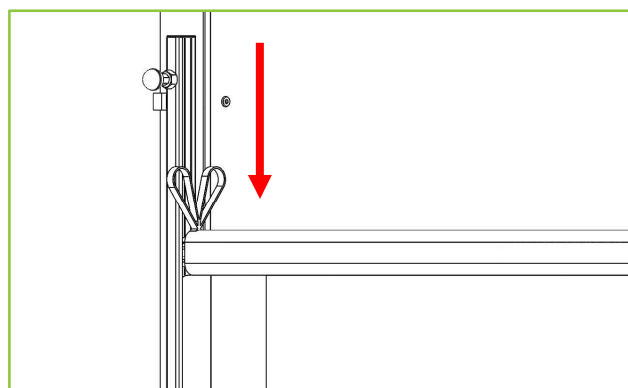

4. Assurez-vous que les barrières latérales sont complètement abaissées et que la barre supérieure est sous le niveau du matelas aux deux extrémités. Si SDR-0-FL4-000 est installé, assurez-vous que la barre supérieure est correctement située par rapport au piston inférieur. Vous devrez peut-être retirer le piston, puis pousser la barre des barrières latérales vers le bas et dans le piston.

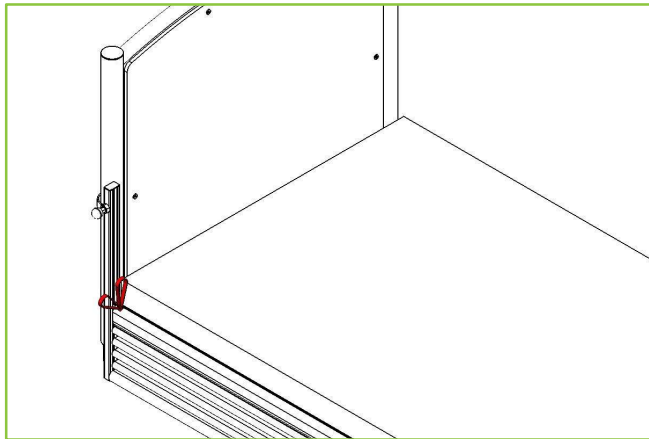

8. Contrôle des fonctionnalités

AVERTISSEMENT

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées après montage par une personne dûment formée et qualifiée.

Soulevez les barrières latérales de FloorBed à l'aide de la poignée de levage et fixez les barres supérieures en place à l'aide des pistons de verrouillage à chaque coin du lit.

Vérifiez les points suivants :

1. Le FloorBed 1 fonctionne-t-il conformément aux attentes sans bruit ni mouvement inattendu ?
2. Y a-t-il des espaces ou des déchirures dans le tissu, des fils ou des coutures lâches ou cassés ?
3. Tous les appareils/accessoires sont-ils serrés et sécurisés ?
4. Le cadre des barrières latérales du FloorBed 1 semble-t-il stable et sécurisé ?
5. Tous les câbles électriques (y compris les accessoires, par ex. la pompe à air du matelas) sont-ils fixés et rangés pour éviter les dommages ?
6. **Tous** les patins en plastique (4 à chaque extrémité du tissu du côté) sont-ils installés le long des barrières latérales ?
7. La barre inférieure est-elle sécurisée et incapable de se déplacer vers le haut ou vers le bas ?
8. La position du tissu des barrières latérales est-elle correcte conformément à la section 6 ?
9. Les fermetures éclair sont-elles complètement fermées ?
10. Des poignées de levage sont-elles montées à chaque extrémité de chaque barrière ?
11. Toutes les pièces sont-elles présentes et exemptes de dommages ?
12. Assurez-vous que chaque support des barrières est fixé à l'extérieur de la tête/du pied de lit à l'aide d'un boulon et d'un écrou et au sommier à l'aide d'un boulon et d'une goupille avec un clip en R.
13. Les pistons de verrouillage sont-ils sécurisés et fonctionnent-ils correctement ?

14. Tous les accessoires, raccords, écrous, boulons, etc. sont-ils serrés et sécurisés comme il convient ?
15. Le cadre est-il mécaniquement sain, sans signe de soudure endommagée ou de peinture fissurée ?
16. Des parties du cadre sont-elles pliées ou hors forme ?
17. Les barrières latérales du FloorBed sont-elles correctement positionnées sur le cadre du lit ?
18. Lorsqu'un matelas spécial ou un surmatelas est utilisé et que la distance entre le haut du matelas non comprimé et le haut de la barrière, le cas échéant, est inférieure à 220 mm/8,7 pouces, une évaluation des risques doit être effectuée pour assurer une sécurité équivalente.

Si un dommage, un problème de performance ou un motif d'inquiétude est constaté au cours de cette inspection, le FloorBed et/ou les barrières latérales du FloorBed doivent être retirés du service et des mesures appropriées doivent être prises.

9. Nettoyage et désinfection

N'essayez pas de nettoyer les barrières latérales du FloorBed 1 lorsqu'elles sont montées sur un lit. Retirez les barrières latérales du lit et placez-les dans un environnement de nettoyage sûr.

Pour désinfecter le lit, utilisez uniquement des détergents conçus pour un usage médical. N'utilisez pas d'abrasifs, d'éponges à récurer ou d'autres matériaux qui pourraient endommager le revêtement. N'utilisez pas de produits corrosifs, caustiques ou acides puissants. N'utilisez pas de détergents qui pourraient altérer la structure ou le comportement des plastiques (essence etc.). Nettoyez la structure métallique des barrières latérales en essuyant avec un chiffon humide et correctement essuyé.

Accora ne peut être tenu responsable de quelconque dommage ou risque de dommage en cas d'utilisation d'agents nettoyants ou désinfectants inappropriés.

Avant de nettoyer le matériau PU, assurez-vous que la mousse qui est enfermée dans le revêtement en tissu des barrières latérales est retirée. Ouvrez la fermeture éclair de la barre supérieure, puis ouvrez la fermeture éclair de la glissière pour le boîtier en mousse.

Le matériau PU peut être lavé jusqu'à 40 degrés Celsius sur un programme en machine délicat ou à la main. Ne pas javelliser, passer au sèche-linge ou repasser.



10. Dépannage

Si des pièces sont considérées comme défectueuses, veuillez contacter Accora et commander un remplacement. N'essayez pas de réparer l'un des composants en cas de dommage ou de défaut.

11. Stockage

Rangez le produit non assemblé et conservez toutes les pièces ensemble en toute sécurité, y compris ce manuel d'instructions. Enveloppez ou couvrez toutes les pièces avec un couvercle de protection pour éviter les dommages. La housse de tissu doit être lavée et laissée sécher correctement avant de la ranger. La housse en tissu peut être pliée et stockée dans une housse en plastique à l'abri de l'humidité et de la saleté. Ne placez pas d'objets lourds ou tranchants sur les barrières latérales du FloorBed 1. Ne pas conserver dans des conditions humides.

12. Garantie

La période de garantie pour les barrières latérales du FloorBed 1 est de 2 ans. Si les barrières latérales ont été acquises pour une maison de soins, le service d'entretien de la maison de soins doit contacter Accora pour obtenir les pièces nécessaires.

13. Élimination

En cas de mise au rebut des matériaux des barrières, les pièces en fin de vie doivent être traitées conformément aux réglementations environnementales en vigueur.

14. Inspection quotidienne

Une inspection visuelle quotidienne est fortement recommandée et peut être effectuée par le personnel soignant, l'utilisateur ou une autre personne.












1. Les barrières latérales du FloorBed 1 fonctionnent-elles conformément aux attentes sans bruit ou mouvement inattendu ?
2. Y a-t-il des signes de mauvaise utilisation, de dommage ou d'usure excessive ?
3. Y a-t-il des espaces ou des déchirures dans le tissu, des fils ou des coutures lâches ou cassés ?
4. Tous les appareils et accessoires sont-ils bien serrés et sécurisés ?
5. Le cadre des barrières latérales du FloorBed 1 semble-t-il stable et sécurisé ?
6. Tous les accessoires sont-ils installés conformément aux instructions du fabricant ou du fournisseur d'accessoires ?
7. Tous les câbles électriques (y compris les accessoires, par ex. la pompe à air du matelas) sont-ils fixés et rangés pour éviter les dommages ?
8. La zone autour, au-dessus et au-dessous du lit est-elle libre de toute obstruction possible ?
9. Y a-t-il des risques que le patient soit coincé ou blessé ?
10. Tous les guides en plastique sont-ils montés et circulent-ils librement dans le rail latéral ?
11. La barre inférieure est-elle sécurisée et incapable de se déplacer vers le haut ou vers le bas ?
12. Le tissu de la barre latérale est-il installé conformément à l'étiquetage (voir l'étiquette « Top and Out Side ») avec les fermetures éclair à l'extérieur ?
13. Les fermetures éclair sont-elles complètement fermées ?
14. Des poignées de levage sont-elles montées à chaque extrémité de chaque barrière latérale du FloorBed ?

Si un dommage, un problème de performance ou un motif d'inquiétude est constaté au cours de cette inspection, le FloorBed et/ou les barrières latérales du FloorBed doivent être retirés du service et des mesures appropriées doivent être prises.

15. Entretien général

Les réparations du lit doivent être effectuées par du personnel dûment formé et qualifié.

16. Tableau des symboles

	Avertissement, attention aux dangers potentiels – se reporter au manuel d'instructions
	Se reporter au manuel d'instructions
	Se reporter au manuel d'instructions
	Conforme au Règlement européen sur les dispositifs médicaux 2017/745
	Dispositif médical conforme au Règlement européen sur les dispositifs médicaux 2017/745
	Représentant pour l'UE
	Numéro de modèle
	Numéro de lot/série
	Date de fabrication
	Fabricant
Top bar 200cm	Barre supérieure de 2000 mm
Bottom bar 200cm	Barre inférieure de 2000 mm
Top bar 220cm	Barre supérieure de 2200 mm
Bottom bar 220cm	Barre inférieure de 2200 mm
	Orientation de montage et avertissement

17. Informations de contact

	Royaume-Uni et reste du monde
Adresse	Accora Ltd. Charter House, Barrington Road Orwell, Cambridge, SG8 5QP
Téléphone	+44 (0)1223 206100
E-mail	info@accora.care
Site internet	www.accora.care

Accora



Accora
Barrington Road
Orwell
Cambridge
SG8 5QP
Royaume-Uni

T : +44 (0)1223 206100
info@accora.care
www.accora.care