


Proxima[®]

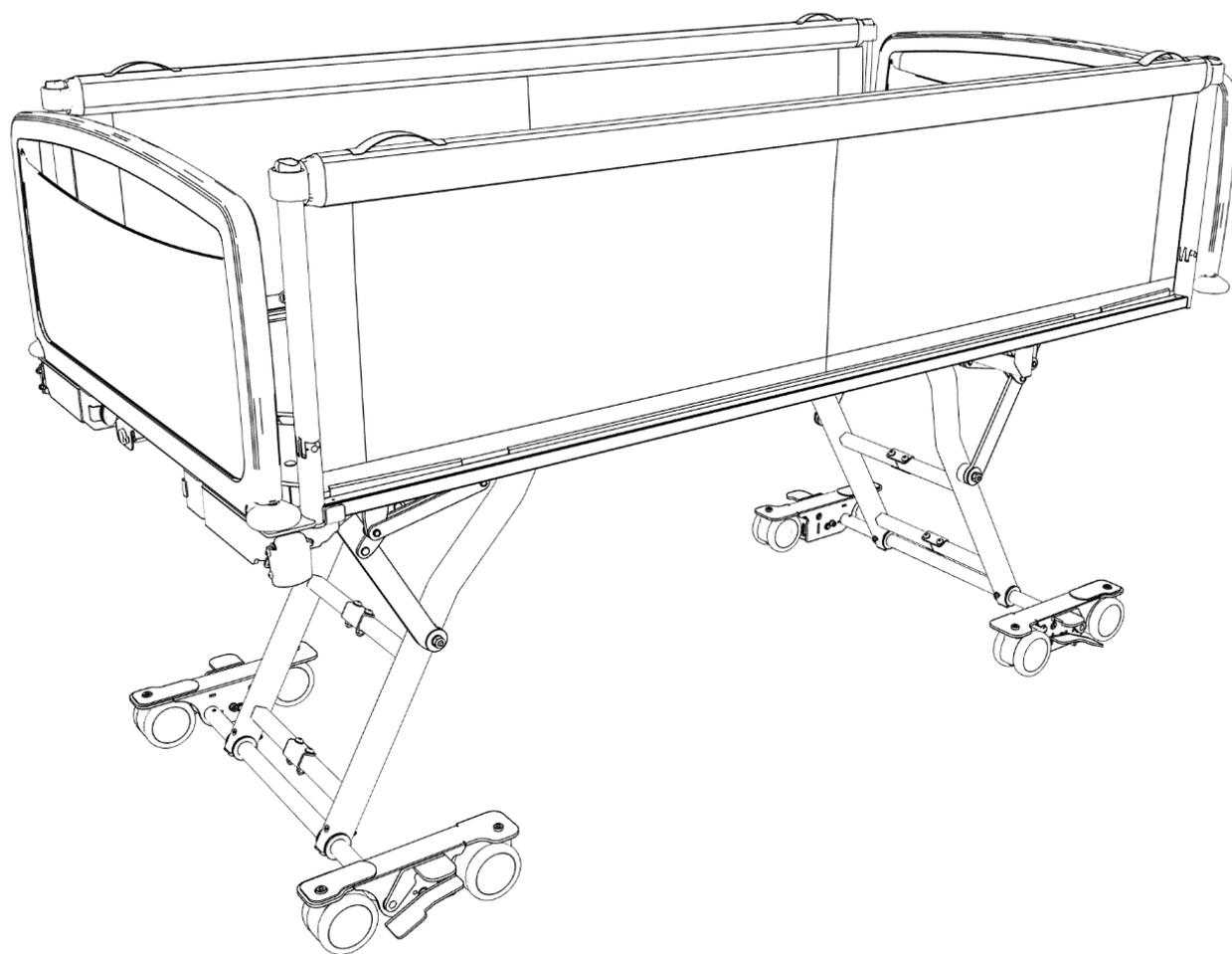

Proxima ProTect Manuel d'utilisation

IFU-FL7-006FR Rev01 DEC 2023

Accora

Table des matières

Titre	Page
Aperçu du produit -----	3
 Avertissements généraux -----	4
1. Mode de livraison -----	4
2. Consignes de sécurité -----	5
3. Utilisation prévue -----	5
4. Caractéristiques techniques -----	5
5. Compatibilité -----	5
6. Assemblage -----	6
7. Fonctionnement -----	9
8. Contrôle du fonctionnement du produit -----	11
9. Nettoyage et désinfection -----	12
10. Enlever et réinstaller le revêtement -----	13
11. Stockage -----	16
12. Inspection quotidienne -----	16
13. Entretien général -----	17
14. Garantie -----	17
15. Mise au rebut -----	17
16. Définition des symboles -----	18
17. Coordonnées -----	19

Translated from IFU-FL7-006EN Rev 01

Bienvenue

Cher/chère client(e),

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit médical Accora. Avant d'utiliser les barrières latérales ProTect, assurez-vous de bien lire et comprendre toutes les instructions décrites dans ce manuel. Toutes les actions et manœuvres réalisées sur les barrières latérales avec revêtement doivent être effectuées conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

Assurez-vous que ce manuel est à la disposition de toute personne utilisant ou manipulant ce lit, pendant toute la durée de vie de ce dernier.

Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez nous contacter. Vous trouverez les coordonnées locales à la section 17.

Informations générales

Les barrières latérales ProTect sont des dispositifs médicaux de Classe 1 conformément au Règlement relatif aux dispositifs médicaux de 2002 tel que modifié, et au Règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



Avis aux utilisateurs

Si un accident grave se produit et que ce dispositif médical est impliqué, que l'accident ait touché l'utilisateur ou le patient, l'utilisateur ou le patient doit signaler l'accident grave auprès du fabricant du dispositif médical et, dans l'Union européenne, l'utilisateur doit également signaler l'accident grave auprès de l'autorité compétente du pays membre dans lequel il se trouve.




Accora Ltd, 38 Main Street,
Swords, Co. Dublin, Irlande, K67 E0A2
Tél. : +353 (0)1 695 0614

Politique de conception et droits d'auteur

® et ™ indiquent des marques commerciales appartenant à Accora Ltd sauf indication contraire. Notre politique étant centrée sur l'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier nos conceptions à tout moment, sans préavis. © Accora Ltd 2023.

Aperçu du produit

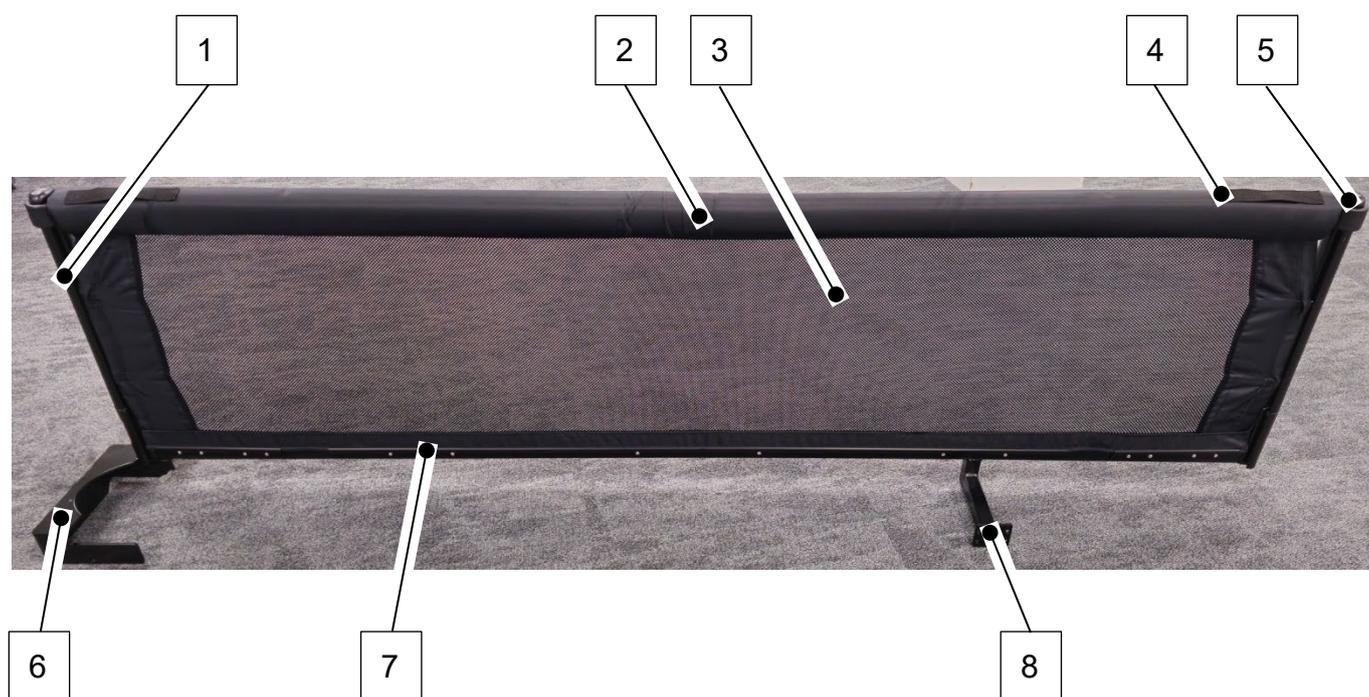

1. Montant rabattable
2. Barre supérieure
3. Panneau en tissu
4. Poignée de levage
5. Bouton de déverrouillage
6. Support côté tête de lit
7. Rail de maintien du revêtement
8. Support côté pied de lit



Avertissements généraux

1. Conservez ce manuel d'utilisation pour pouvoir le consulter ultérieurement.
2. Ces instructions doivent être suivies afin de garantir une utilisation sûre et efficace de ce lit, ainsi que la sécurité de tous les utilisateurs, des aidants et du personnel soignant.
3. Ces barrières latérales ProTect doivent être assemblées, montées et utilisées conformément à ces instructions.
4. Les dispositifs et les instructions de sécurité concernant l'utilisation des barrières latérales ProTect doivent être strictement suivis.
5. Ces barrières latérales ProTect ne doivent pas être exposées à la fumée, une flamme nue, des températures extrêmes, des gaz inflammables ou toute autre substance ou situation dangereuse.
6. Accora n'est pas responsable des dommages, blessures ou accidents résultant de modifications non autorisées, de l'utilisation de pièces de rechange n'étant pas d'origine, de négligence ou d'une utilisation non conforme à ce manuel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
7. Lorsque vous installez des câbles pour d'autres équipements électroniques utilisés avec le lit (par exemple une pompe de matelas pneumatique), assurez-vous que les câbles ne peuvent pas être comprimés, écrasés ou endommagés par les barrières latérales ProTect.
8. N'attachez rien aux barrières latérales ProTect.
9. Vous ne devez jamais vous asseoir, vous tenir debout ou vous suspendre aux barrières latérales ProTect.
10. Ne déplacez pas le lit en poussant ou en tirant sur les barrières latérales ProTect.
13. Les barrières latérales ne doivent pas être utilisées pour immobiliser un patient. Les patients doivent faire l'objet d'une évaluation des risques par un professionnel de santé qualifié.
14. Si un matelas spécialisé ou une alèse sont utilisés, et que la distance entre le haut du matelas non compressé et le haut de la barrière latérale, si installée, est inférieure à 220 mm/8,7 pouces, une évaluation des risques doit être réalisée afin de garantir que cela n'affecte pas le niveau de sécurité.
15. Tenez les enfants et les animaux domestiques qui ne sont pas sous la surveillance d'un adulte à l'écart de ce lit, car il existe un risque de blessure et/ou d'étouffement avec des pièces de petite taille.
16. L'assemblage et l'installation DOIVENT être effectués par un personnel dûment formé et qualifié.
17. Le risque de coincement et d'enchevêtrement est plus élevé lorsqu'un accessoire d'ajustement de longueur du lit Proxima est utilisé avec les barrières latérales ProTect. La rallonge de barrière latérale ProTect doit être utilisée afin de réduire tout risque associé.
18. Ne modifiez pas les barrières latérales ProTect.
19. N'installez pas les barrières latérales ProTect si un utilisateur est dans le lit. L'utilisateur doit être déplacé hors du lit avant l'installation des barrières latérales.

1. Mode de livraison-----

Les barrières latérales ProTect sont livrées dans une boîte.

Une inspection doit être réalisée à la réception afin de s'assurer que la livraison est complète et que le produit n'a pas été endommagé. Toute pièce manquante, tout défaut ou tout dommage doit être immédiatement signalé par écrit au transporteur et à Accora.

2. Consignes de sécurité -----

1. Avant d'utiliser les barrières latérales ProTect, vous devez lire ce manuel d'utilisation et vous devez utiliser le lit conformément à celui-ci.
2. Les barrières latérales ProTect ne doivent pas être utilisées si elles présentent des défauts susceptibles de blesser le patient, le personnel ou une personne tierce, ou d'endommager le lit ou les alentours.
3. Avant de nettoyer les barrières latérales ProTect, débranchez l'alimentation électrique du lit.
4. Seuls des matériaux et des composants d'origine peuvent être utilisés pour réparer les barrières latérales ProTect, sans quoi le fabricant ne peut fournir aucune garantie contre tout dommage éventuel.

3. Utilisation prévue -----

Les barrières latérales ProTect SDR-PT1-FL7-000 ne peuvent être utilisées qu'avec le modèle Proxima.

Les barrières latérales contribuent à créer un environnement plus sûr pour l'utilisateur du lit, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée.

4. Caractéristiques techniques -----

Numéro de pièce	Description
SDR-PT1-FL7-000	Kit de barrière latérale ProTect 200 cm. Inclut le revêtement et les supports. Convient au Proxima FL7
SDREXT-0-FL7-000	Rallonge de barrière latérale ProTect, devant être utilisée avec la rallonge de sommier Proxima.

Les barrières latérales ProTect peuvent être montées sur les modèles Proxima suivants :

Numéro de pièce	Description
NSB-0-FL7-000	Proxima Royaume-Uni
NSB-0-FL7-000EU	Proxima UE
NSB-0-FL7-000AU	Proxima AU

Remarque : certains numéros de pièce de lit peuvent être suivis d'un suffixe indiquant une région (par exemple EU ou US).

Informations sur les conditions ambiantes :

État	Plage de température	Humidité relative	Pression atmosphérique	Élévation au-dessus du niveau de la mer
En fonctionnement	+5 °C à +40 °C +41 °F à +104 °F	20 % à 80 % (sans condensation)	700 hPa à 1 060 hPa	Max. 3 000 mètres
Transport/stockage	-10 °C à +50 °C 14 °F à +122 °F			

Les accessoires et pièces de rechange des barrières latérales ProTect sont listés ci-dessous :

Numéro de pièce	Description
SDRFAB-0-PT1-000	Revêtement de barrière latérale ProTect 200 cm, FL6, FL7 (lot de 2)
SDRBR-PT1-FL6-000	Lot de supports de barrière latérale ProTect, FL7 (Lot de 4)

5. Compatibilité -----

Le tableau ci-dessous indique si d'autres accessoires Proxima sont compatibles.

Accessoires montés sur Proxima	Barrières latérales ProTect
*SDRFLD-0-FL7-000 Lot de barrières latérales rabattables Proxima	☒
*STLEV-0-FL7-000 Barre d'appui de lit standard Proxima	☒
*STLEVLKT-0-FL7-500 Lot de barres d'appui de lit rallongé Proxima, gauche et droite	☒

*L'accessoire n'est pas disponible dans toutes les régions.

La rallonge de barrière latérale ProTect SDREXT-0-FL7-000 **doit être utilisée** lorsque le sommier est rallongé afin de s'assurer que les écarts sont conformes.

6. Assemblage -----



ATTENTION

L'assemblage DOIT être effectué par un personnel dûment formé et qualifié.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées après l'assemblage par un personnel dûment formé et qualifié.

L'assemblage DOIT être réalisé à un endroit dégagé qui n'est pas encombré, et les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart.

Si les barrières latérales ProTect ont été salies ou contaminées au cours du transport, veuillez consulter les instructions de nettoyage et de désinfection.

Avant d'installer les barrières latérales ProTect, assurez-vous que les freins des roulettes sont serrés.

Assurez-vous que le patient n'est pas dans le lit avant de monter les barrières latérales ProTect.

Si un matelas spécialisé ou une alèse sont utilisés, et que la distance entre le haut du matelas non compressé et le haut de la barrière latérale, si installée, est inférieure à 220 mm/8,7 pouces, une évaluation des risques doit être réalisée pour s'assurer que cela n'affecte pas le niveau de sécurité.

Les pièces suivantes sont incluses avec les barrières latérales ProTect :

1. 1 x Rail latéral droit
2. 1 x Rail latéral gauche
3. 8 x Boulons et rondelles
4. 1 x Clé Allen

Toute pièce manquante ou endommagée doit être immédiatement signalée par écrit au transporteur et à Accora.

Avant d'installer les barrières latérales ProTect, relevez le lit à sa hauteur maximale afin de faciliter l'installation.

Les barrières latérales ProTect s'installent des deux côtés du lit.

1. Avant d'installer les barrières latérales ProTect, le lit doit être relevé à sa hauteur maximale et la tête de lit doit être retirée comme illustré sur la Figure 6.1. Veuillez consulter le manuel d'utilisation Proxima.



Figure 6.1

2. Enlevez le levier RCP droit comme illustré sur la Figure 6.2 (vue de la tête du lit) en dévissant les deux boulons qui le fixent comme illustré sur la Figure 6.3. Conservez les deux boulons pour pouvoir réinstaller le levier RCP lors d'une étape ultérieure.



Figure 6.2



Figure 6.3

3. Enlevez le câble de RCP de l'attache-câble sous le support de RCP en ouvrant la languette de verrouillage pour libérer l'attache-câble comme illustré sur la Figure 6.4.



Figure 6.4

4. Retirez les deux boulons qui fixent le support de RCP au lit comme illustré sur la Figure 6.5 et faites glisser le support de RCP hors de son encastrement comme illustré sur la Figure 6.6.



Figure 6.5



Figure 6.6

5. Munissez-vous de la barrière latérale ProTect droite indiquée sur la Figure 6.7.

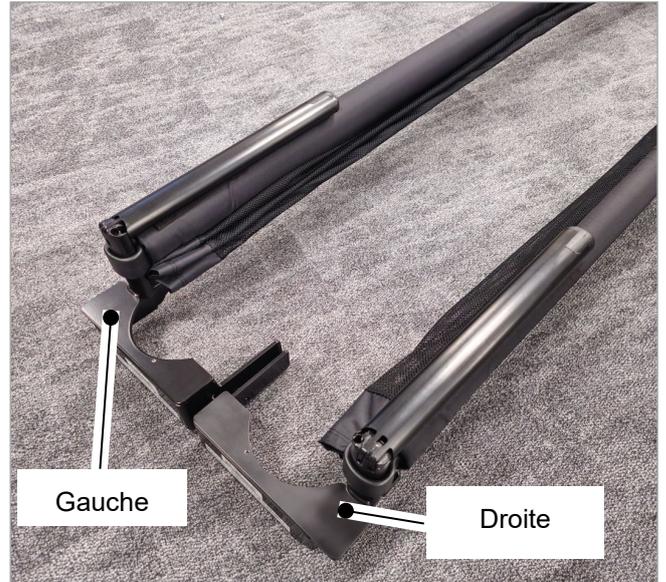


Figure 6.7

6. Faites glisser le support de tête de lit du côté droit de la barrière latérale ProTect dans le canal de la tête du lit, comme illustré sur la Figure 6.8.



Figure 6.8

- Alignez les trous du support de tête de lit de la barrière latérale ProTect avec ceux de l'encastrement. À l'aide des deux boulons retirés à l'étape 4, serrez à la main comme illustré sur la Figure 6.9.



Figure 6.9

- Alignez les trous du support de pied de lit avec les quatre trous supérieurs de la plaque de fixation du cadre du lit, comme indiqué sur la Figure 6.10.



Figure 6.10

- Fixez le support du pied de lit à l'aide des quatre boulons et rondelles fournis avec la barrière latérale ProTect. Serrez chaque boulon à la main jusqu'à ce que les quatre soient insérés comme illustré sur la Figure 6.11, puis serrez-les complètement.

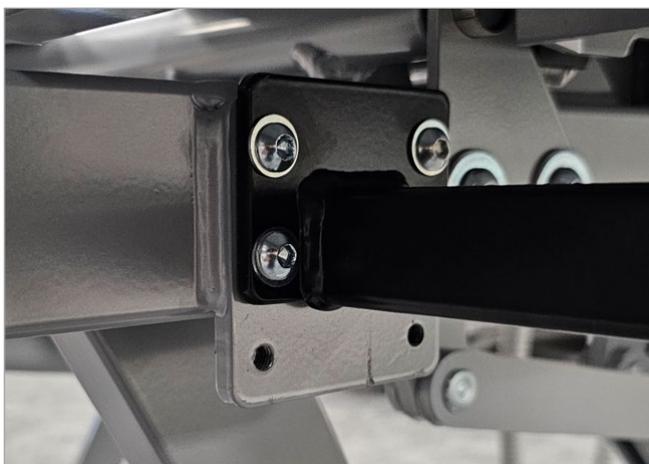


Figure 6.11

- Serrez complètement les boulons du support de la tête de lit.
- Dévissez la vis de l'attache-câble sur la face inférieure du support de tête de lit comme illustré sur la Figure 6.12 puis enlevez-la. Ouvrez l'attache-câble et placez-le autour du câble noir retiré à l'étape 3. Fixez l'attache-câble dans le même sens que celui indiqué sur la Figure 6.9.

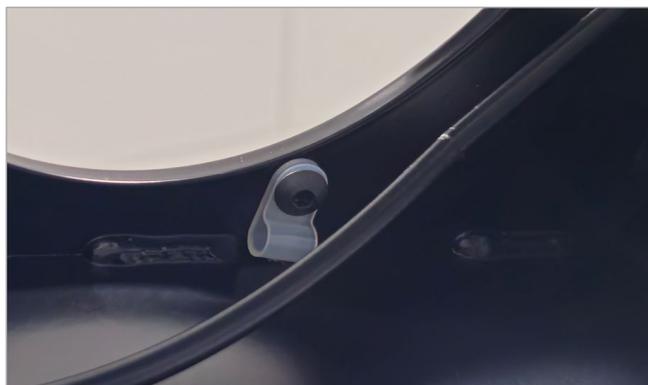


Figure 6.12

Remarque : Assurez-vous que le câble noir est installé comme illustré sur la Figure 6.13.



Figure 6.13

- Répétez les étapes 2 à 11 pour monter la barrière latérale ProTect gauche du côté gauche du lit.
- Remplacez la tête de lit. Veuillez consulter le manuel d'utilisation Proxima.

7. Fonctionnement-----



ATTENTION

Un contrôle du fonctionnement du produit DOIT être réalisé par un personnel dûment formé et qualifié.

Serrez toujours les freins lorsque le lit est immobile ou laissé sans surveillance.

Les barrières latérales ProTect doivent toujours être relevées lorsque le patient est seul, sauf si une évaluation clinique montrant que cela n'est pas nécessaire a été réalisée.

Vous ne devez jamais vous asseoir, vous tenir debout ou vous suspendre aux barrières latérales ProTect.

N'attachez rien aux barrières latérales ProTect.

Les barrières latérales ProTect sont livrées en position repliée. Les étapes suivantes décrivent comment utiliser les barrières latérales ProTect.

Les barrières latérales doivent être relevées et abaissées d'un seul côté du lit à la fois.

Relever les barrières latérales ProTect

1. Relevez les deux montants rabattables pour qu'ils soient en position verticale comme illustré sur la Figure 7.1.

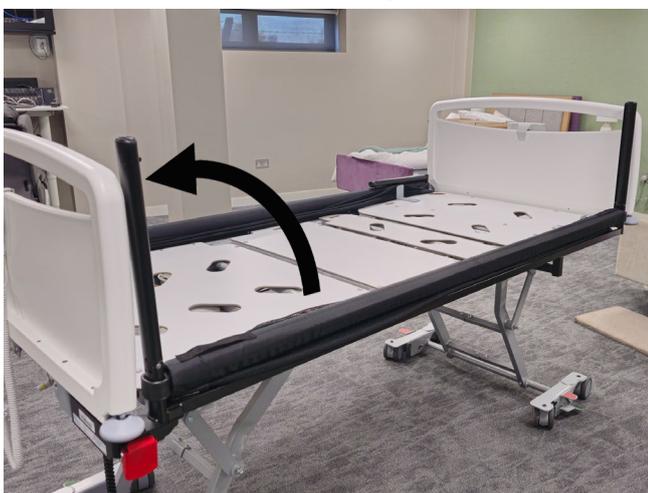


Figure 7.1

2. À l'aide de la poignée de levage située sur la barre supérieure, tirez fermement une extrémité de la barrière latérale vers le haut du montant rabattable, comme illustré sur la Figure 7.2 et la Figure 7.3. Un clic se fait entendre lorsqu'elle se met en place.



Figure 7.2

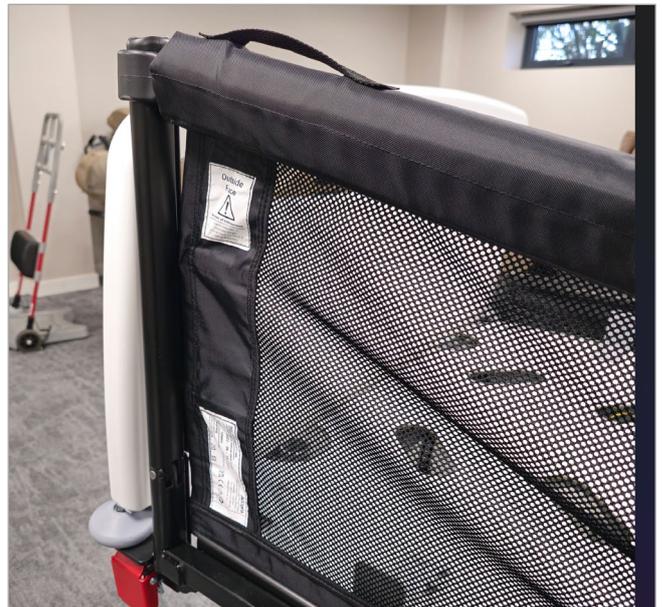


Figure 7.3

3. Tirez fermement sur l'autre extrémité de la barrière latérale ProTect jusqu'à ce qu'elle se mette en place, comme illustré sur la Figure 7.4.



Figure 7.4

4. Répétez la même procédure pour la barrière latérale ProTect située de l'autre côté du lit, comme illustré sur la Figure 7.5.



Figure 7.5

Abaisser les barrières latérales ProTect

Les barrières latérales doivent être relevées et abaissées d'un seul côté du lit à la fois.

1. Pour abaisser la barrière latérale ProTect, tirez la poignée de levage vers le haut et appuyez sur le bouton de déverrouillage comme illustré sur la Figure 7.6. Maintenez le bouton de déverrouillage tout en abaissant la poignée de levage.



Figure 7.6

2. Répétez la même procédure qu'à l'étape 1 pour abaisser l'autre côté de la barrière latérale ProTect comme illustré sur la Figure 7.7.



Figure 7.7

Rabaissez les montants rabattables de manière à ce qu'ils reposent sur la barre supérieure.

8. Contrôle du fonctionnement du produit-----



ATTENTION

Un contrôle du fonctionnement du produit DOIT être réalisé par un personnel dûment formé et qualifié.

Serrez toujours les freins lorsque le lit est immobile ou laissé sans surveillance.

1. Assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés.
2. Assurez-vous que les boutons de déverrouillage fonctionnent correctement.
3. Le revêtement présente-t-il des trous ou des déchirures, ou des coutures ou des fils décousus ou cassés ?
4. Assurez-vous que les supports des barrières latérales ProTect sont bien fixés.
5. Tous les câbles électriques (y compris ceux des accessoires tels qu'une pompe de matelas pneumatique) sont-ils bien fixés et installés de façon à éviter tout dommage ?
6. Tous les glisseurs en plastique (2 à chaque extrémité du panneau en tissu des barrières latérales ProTect) sont-ils montés sur les rails des barrières latérales ?
7. La barre inférieure est-elle bien fixée et est-il impossible de la déplacer vers le haut ou vers le bas ?
8. La fermeture éclair de la barre supérieure est-elle complètement fermée ?
9. L'étiquette « Outside » est-elle orientée vers l'extérieur du lit ?
10. Les poignées de levage sont-elles toujours solidement cousues sur la barre supérieure ?
11. Relevez les barrières latérales ProTect pour vous assurer qu'elles se mettent bien en position une fois relevées. Appuyez doucement sur la barre supérieure pour vous assurer qu'elle est bien fixée.
12. Assurez-vous que le revêtement n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas de trous ou de fils décousus.
13. Abaissez les barrières latérales ProTect et repliez les montants rabattables pour vous assurer qu'ils se rabattent de manière à ce que les deux extrémités soient en dessous du niveau du matelas.
14. Si un matelas spécialisé ou une alèse sont utilisés, et que la distance entre le haut du matelas non compressé et le haut de la barrière latérale, si installée, est inférieure à 220 mm/8,7 pouces, une évaluation des risques doit être réalisée afin de garantir que cela n'affecte pas le niveau de sécurité.

9. Nettoyage et désinfection -----



ATTENTION

Lorsque vous nettoyez ou désinfectez le lit, celui-ci doit être débranché de sa source d'alimentation électrique.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées par une personne compétente après le nettoyage et la désinfection.

Le lit DOIT être nettoyé et désinfecté avant d'être réutilisé par un nouveau patient.

Informations de nettoyage

Pour désinfecter le lit et les accessoires :

- N'utilisez que des produits nettoyants conçus pour être utilisés dans le domaine des soins de santé.
- N'utilisez pas d'abrasifs, d'éponges métalliques ou d'autres matériaux susceptibles d'endommager les couches de revêtement.
- N'utilisez pas de produits corrosifs, caustiques ou d'acides forts.
- N'utilisez pas de détergents susceptibles d'altérer la structure ou le comportement des matières plastiques (essence, etc.).
- Nettoyez avec un chiffon humide.

Le lit et les accessoires ne sont pas conçus pour être entretenus dans des nettoyeurs automatiques de lit ou pour être nettoyés à l'eau sous pression, par pulvérisation, sous une douche ou à la vapeur.

Accora ne peut être tenu responsable de tout dommage ou de tout risque de dommage en cas d'utilisation de produits de nettoyage ou de désinfection inappropriés.

Le nettoyage doit être effectué à intervalles réguliers, déterminés par l'établissement. Le lit et les accessoires doivent être nettoyés entre chaque patient.

Les matériaux en polyuréthane peuvent être lavés à 40 degrés Celsius maximum sur cycle délicat ou de lavage à la main. Ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge et ne pas repasser. Veuillez consulter le guide ci-dessous.



10. Enlever et réinstaller le revêtement --

Les étapes suivantes décrivent comment enlever le revêtement de la barrière latérale ProTect pour le nettoyer.

Retrait

1. Assurez-vous que la barrière latérale ProTect est en position relevée comme illustré sur la Figure 10.1.



Figure 10.1

2. Ouvrez la fermeture éclair du revêtement et enlevez-le de la barre supérieure comme illustré sur la Figure 10.2 et la Figure 10.3. Le revêtement n'est plus retenu que par les glisseurs en plastique et par le rail de maintien.



Figure 10.2



Figure 10.3

3. Abaissez le revêtement jusqu'à ce qu'il soit replié au pied de la barrière latérale comme illustré sur la Figure 10.4.



Figure 10.4

4. Faites coulisser les glisseurs en plastique (deux à chaque extrémité de la barrière latérale ProTect) jusqu'en bas du rail, un côté à la fois, comme illustré sur la Figure 10.5 et la Figure 10.6, jusqu'à ce que les quatre glisseurs en plastique soient sortis.



Figure 10.5



Figure 10.6

5. Posez le panneau en tissu à plat sur le sommier comme illustré sur la Figure 10.7.



Figure 10.7

6. Faites sortir délicatement une extrémité de l'ourlet du revêtement hors de la section courte du rail de maintien comme illustré sur la Figure 10.8 et la Figure 10.9.



Section centrale du rail de maintien du revêtement



Figure 10.9

7. Tirez délicatement sur le reste du revêtement pour le libérer des rails de maintien dans le sens indiqué sur la Figure 10.10.



Figure 10.10

Installation

1. En veillant à ce que l'étiquette « Outside » du revêtement soit orientée vers le haut, replacez le revêtement sur le rail de maintien à partir de la partie centrale, comme illustré sur la Figure 10.11.



Figure 10.11

2. Insérez le revêtement dans les deux sections courtes restantes du rail de maintien en prenant soin de ne pas accrocher le tissu, comme illustré sur la Figure 10.12.



Figure 10.12

3. Remplacez le glisseur en plastique supérieur comme illustré sur la Figure 10.13, en l'insérant dans le canal, comme illustré sur la Figure 10.14.



Figure 10.13



Figure 10.14

4. Remplacez le glisseur en plastique inférieur en l'insérant dans le même canal indiqué sur la Figure 10.14.
5. Répétez les étapes 4 et 5 pour l'autre côté du panneau en tissu.
6. Tirez le revêtement jusqu'à la barre supérieure et refermez la fermeture éclair comme illustré sur la Figure 10.15 et la Figure 10.16.



Figure 10.15



Figure 10.16

7. Vérifiez que l'étiquette « Outside Face » est orientée vers l'extérieur du lit, comme illustré sur la figure Figure 10.15.

11. Stockage-----

Afin de ne rencontrer aucun problème lors du stockage du produit, nous recommandons de :

1. Retirer tous les accessoires.
2. Envelopper les accessoires ou les couvrir afin de ne pas endommager les couches de revêtement et les pièces en plastique.
3. Les accessoires doivent être stockés à une température comprise entre -10 °C et +50 °C.
4. Les accessoires doivent être stockés à une humidité relative (sans condensation) comprise entre 20 % et 80 %.

12. Inspection quotidienne -----

Une inspection visuelle doit être réalisée tous les jours par le soignant, l'utilisateur ou toute autre personne.

Les vérifications suivantes doivent être effectuées :

1. Des signes de mauvaise utilisation ou d'une usure excessive sont-ils présents ?
2. Les fixations et assemblages sont-ils tous sûrs et bien serrés ?
3. Le revêtement présente-t-il des trous ou des déchirures, ou des coutures ou des fils décousus ou cassés ?
4. Le produit présente-t-il des risques de coincement ou de blessure pour le patient ?
5. Assurez-vous que les deux glisseurs situés aux extrémités de la barrière latérale sont bien placés dans le rail de la barrière latérale.
6. La fermeture éclair est-elle complètement fermée ?
7. L'étiquette « Outside » est-elle orientée vers l'extérieur du lit ?
8. La barre inférieure est-elle bien fixée et est-il impossible de la déplacer vers le haut ou vers le bas ?
9. Les barrières latérales ProTect sont-elles stables et installées de façon sécurisée ? En position relevée, appuyez doucement sur la barre supérieure pour vous assurer qu'elle est bien fixée.
10. Les barrières latérales ProTect ont-elles été installées conformément aux instructions ?
11. Tous les câbles électriques (y compris ceux des accessoires tels qu'une pompe de matelas pneumatique) sont-ils bien fixés et installés de façon à éviter tout dommage ?

Si, pendant l'inspection, vous observez que le produit est endommagé, qu'il y a des problèmes de fonctionnement, ou si vous avez toute inquiétude, cessez d'utiliser la barrière latérale et prenez les mesures appropriées.

13. Entretien général-----



ATTENTION

L'entretien DOIT être effectué par un personnel dûment formé et qualifié.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées après l'entretien par un personnel dûment formé et qualifié.

N'effectuez pas l'entretien si l'utilisateur ou le patient se trouve dans le lit.

Les réparations du lit doivent être effectuées par un personnel dûment formé et qualifié.

14. Garantie -----

Les barrières latérales ProTect sont couvertes par une garantie de 2 ans.

15. Mise au rebut-----

En cas d'élimination des matériaux provenant du lit, les pièces en fin de vie doivent être éliminées conformément aux réglementations environnementales en vigueur.

16. Définition des symboles-----

	Avertissement général
	Précautions générales
	Conforme au Règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
	Conforme au Règlement relatif aux dispositifs médicaux de 2002 tel que modifié
	Numéro du modèle
	Numéro de série
	Date de fabrication
	Fabricant
	Dispositif médical conformément au Règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
	Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter le manuel d'utilisation
	Utilisation uniquement en intérieur
	Représentant de la CE
	Sens de montage et avertissement

17. Coordonnées

	Royaume-Uni et reste du monde	États-Unis
Adresse	Accora Ltd. Charter House Barrington Road Orwell Cambridge SG8 5QP Royaume-Uni	Accora Inc. 9210 Corporate Blvd. Suite 120 Rockville MD 20850 États-Unis
Téléphone	+44 (0)1223 206100	+1 301-560-2400
E-mail	info@accora.care	information@accora.care
Site Web	www.accora.care	

Accora



Accora
Barrington Road
Orwell
Cambridge
SG8 5QP
Royaume-Uni

Tél. : +44 (0)1223 206100
info@accora.care
www.accora.care

IFU-FL7-006FR Rev 01