


Proxima®

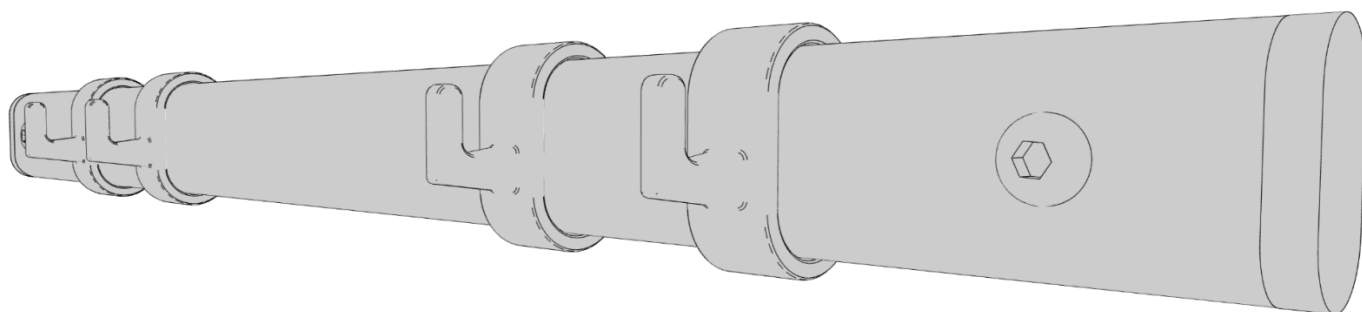

Support pour poche d'urine Proxima Manuel d'utilisation

IFU-FL7-008FR Rev 01

Accora

Table des matières

Titre	Page
Aperçu du produit -----	3
 Avertissements généraux -----	4
1. Mode de livraison -----	4
2. Consignes de sécurité -----	4
3. Utilisation prévue -----	4
4. Caractéristiques techniques -----	5
5. Compatibilité -----	5
6. Assemblage -----	5
7. Fonctionnement -----	7
8. Contrôle du fonctionnement du produit -----	7
9. Nettoyage et désinfection -----	8
10. Stockage -----	8
11. Inspection quotidienne -----	9
12. Entretien général -----	9
13. Garantie -----	9
14. Mise au rebut -----	9
15. Définition des symboles -----	10
16. Coordonnées -----	10

Bienvenue

Cher/chère client(e),

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit médical Accora. Avant d'utiliser ce support pour poche d'urine, assurez-vous de bien lire et comprendre toutes les instructions décrites dans ce manuel. Toutes les actions et manœuvres réalisées sur le support pour poche d'urine doivent être effectuées conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

Assurez-vous que ce manuel est à la disposition de toute personne utilisant ou manipulant ce lit, pendant toute la durée de vie de ce dernier.

Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez nous contacter. Vous trouverez les coordonnées locales à la section 16.

Informations générales


EC	REP
-----------	------------

Accora Ltd, 38 Main Street,
Swords, Co. Dublin, Irlande, K67 E0A2
Tél. : +353 (0)1 695 0614

Politique de conception et droits d'auteur

® et ™ indiquent des marques commerciales appartenant à Accora Ltd sauf indication contraire. Notre politique étant centrée sur l'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier nos conceptions à tout moment, sans préavis. © Accora Ltd 2023.

Aperçu du produit

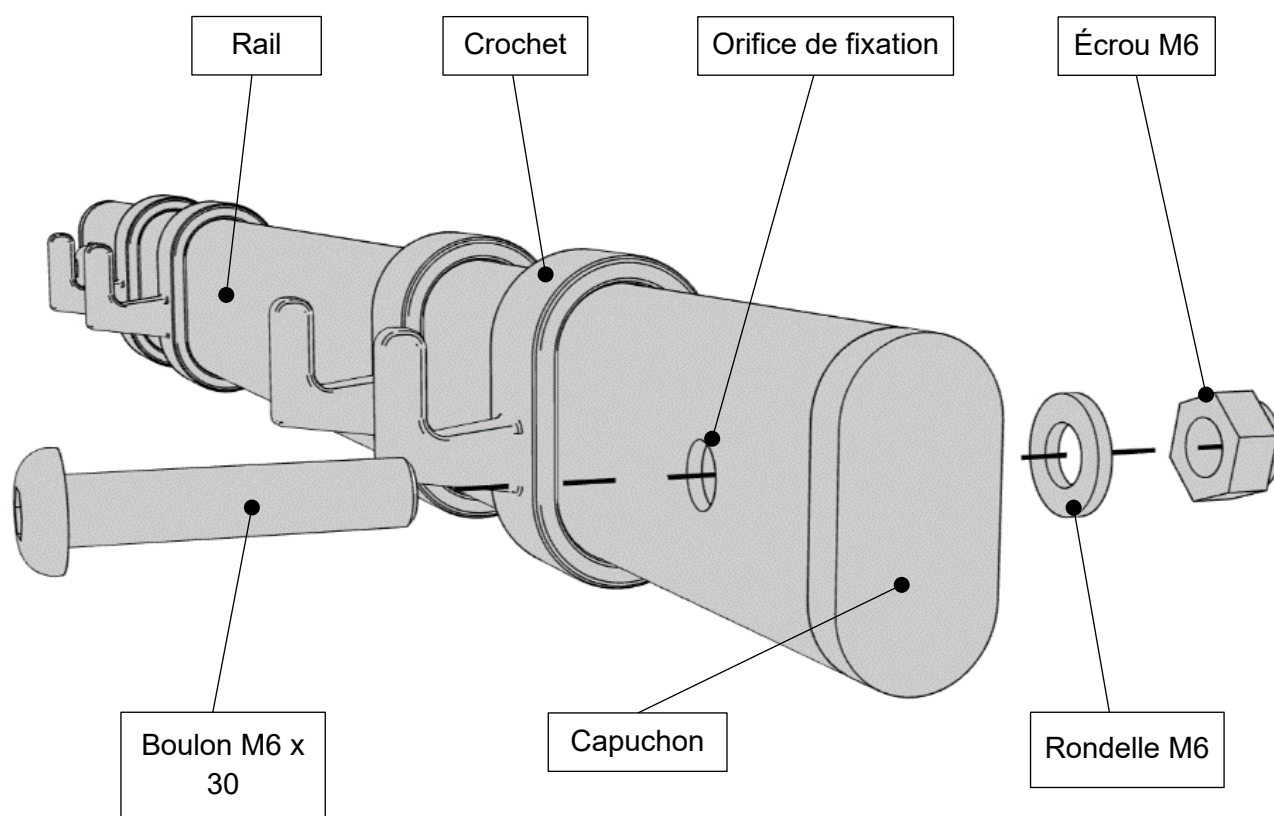



Avertissements généraux

1. Conservez ce manuel d'utilisation pour pouvoir le consulter ultérieurement.
2. Ces instructions doivent être suivies afin de garantir une utilisation sûre et efficace de cet accessoire, ainsi que la sécurité de tous les utilisateurs, des aidants et du personnel soignant.
3. Ce support pour poche d'urine doit être assemblé, monté et utilisé conformément à ces instructions.
4. Les dispositifs et les instructions de sécurité concernant l'utilisation du support pour poche d'urine doivent être strictement suivis.
5. Le support pour poche d'urine ne doit pas être exposé à la fumée, une flamme nue, des températures extrêmes, des gaz inflammables ou toute autre substance ou situation dangereuse.
6. Le support pour poche d'urine convient aux poches d'urine uniquement, tout autre équipement, tel que les pompes à perfusion, ne doit pas y être accroché.
7. Accora n'est pas responsable des dommages, blessures ou accidents résultant de modifications non autorisées, de l'utilisation de pièces de rechange n'étant pas d'origine, de négligence ou d'une utilisation non conforme à ce manuel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
8. Les patients et les utilisateurs doivent faire l'objet d'une évaluation des risques afin de s'assurer qu'ils comprennent ce manuel et qu'ils utilisent le support pour poche d'urine sans risque pour eux-mêmes et autrui.
9. Accora n'est pas responsable des dommages, blessures ou accidents résultant d'une négligence ou d'une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

1. Mode de livraison-----

Le support pour poche d'urine est livré par lot de deux, et le crochet est déjà installé.

Une inspection doit être réalisée à la réception afin de s'assurer que la livraison est complète et que le produit n'a pas été endommagé.

Toute pièce manquante, tout défaut ou tout dommage doit être immédiatement signalé par écrit au transporteur et à Accora.

2. Consignes de sécurité -----

1. Avant d'utiliser le support pour poche d'urine, vous devez lire ce manuel d'utilisation et vous devez utiliser le support pour poche d'urine conformément à celui-ci.
2. Le support pour poche d'urine ne doit pas être utilisé s'il présente des défauts susceptibles de blesser le patient, le personnel ou une personne tierce, ou d'endommager le lit ou les alentours.
3. Retirez le support pour poche d'urine avant de le nettoyer.

3. Utilisation prévue -----

Le support pour poche d'urine est conçu pour attacher de manière sécurisée les poches d'urine sur le lit.

4. Caractéristiques techniques -----

Numéro de pièce	Description
URBAG-0-FL7-000	Support pour poche d'urine Proxima

Le support pour poche d'urine peut être monté sur les modèles Proxima suivants :

Numéro de pièce	Description
NSB-0-FL7-000	Proxima Royaume-Uni
NSB-0-FL7-000US	Proxima US
NSB-0-FL7-000EU	Proxima UE
NSB-0-FL7-000AU	Proxima AU

Informations sur les conditions ambiantes :

État	Plage de température	Humidité relative	Pression atmosphérique	Élévation au-dessus du niveau de la mer
En fonctionnement	+5 °C à +40 °C +41 °F à +104 °F	20 % à 80 % (sans condensation)	700 hPa à 1 060 hPa	Max. 3 000 mètres
Transport/stockage	-10 °C à +50 °C 14 °F à +122 °F			

5. Compatibilité -----

Le tableau ci-dessous indique si d'autres accessoires Proxima sont compatibles.

Accessoires montés sur Proxima	Support pour poche d'urine
STLEV-0-FL7-000 Barre d'appui de lit standard Proxima	✓
*SDRFLD-0-FL7-000 Lot de barrières latérales rabattables Proxima	✓
*SDR-PT1-FL7-000 Kit de barrière latérale ProTect 200 cm	✓
*SDREXT-0-FL7-000 Rallonge de barrière latérale ProTect	✓
LIFOL-0-FL1-000 Potence de lit FloorBed, FB1, FB2, FB1-Plus, FL6 et FL7	✓
UNDLIGHT-0-FL7-000 Kit d'éclairage sous lit Proxima	✓
IVPOLE-0-FL7-000 Pied à perfusion Proxima	✓

*L'accessoire n'est pas disponible dans toutes les régions.

6. Assemblage -----



ATTENTION

L'assemblage DOIT être effectué par un personnel dûment formé et qualifié.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées après l'assemblage par un personnel dûment formé et qualifié.

L'assemblage DOIT être réalisé à un endroit dégagé qui n'est pas encombré, et les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart.

Assurez-vous que le lit n'est pas branché à l'alimentation électrique.

Si le support pour poche d'urine a été sali ou contaminé au cours du transport, veuillez consulter les instructions de nettoyage et de désinfection.

Avant d'installer le support pour poche d'urine, assurez-vous que les freins des roulettes sont serrés.

Assurez-vous d'avoir bien reçu les pièces suivantes :

1. 2 x Rails munis de 4 crochets
2. 4 x Rondelles M6
3. 4 x Boulons M6 x 30
4. 4 x Contre-écrous M6

Si le support pour poche d'urine est endommagé, cela doit être immédiatement signalé par écrit au transporteur et à Accora.

Avant d'installer le support pour poche d'urine, relevez le lit à une hauteur adaptée pour l'installation.

Le support pour poche d'urine peut être installé des deux côtés du lit comme indiqué sur la Figure 6.1 et la Figure 6.2.

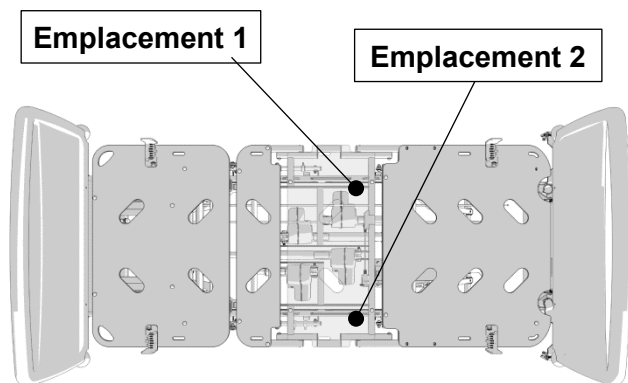


Figure 6.1

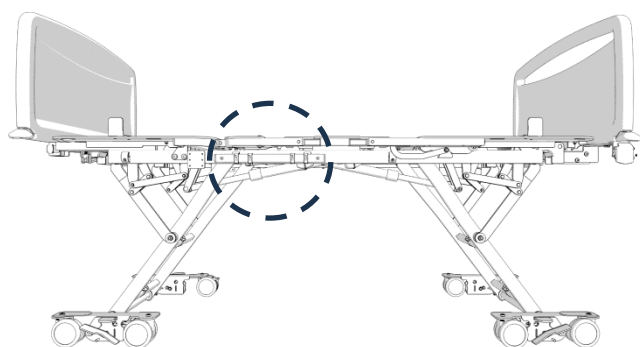


Figure 6.2

Installation

1. Prenez l'un des rails, deux boulons M6 x 30, deux rondelles M6 et deux contre-écrous M6.
2. Assurez-vous que les 4 crochets du rail sont positionnés à l'intérieur des trous de fixation comme illustré sur la Figure 6.3.

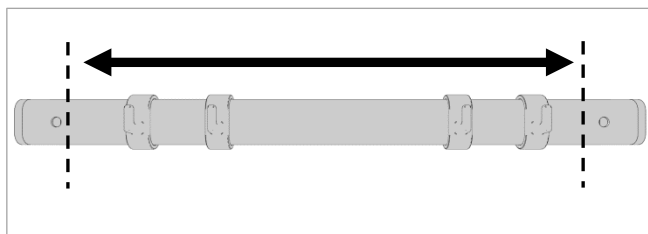


Figure 6.3

3. Posez le rail contre les supports de fixation et fixez-le à l'aide de deux boulons M6 x 30, deux rondelles M6 et deux contre-écrous M6, comme illustré sur la Figure 6.4 et la Figure 6.5.

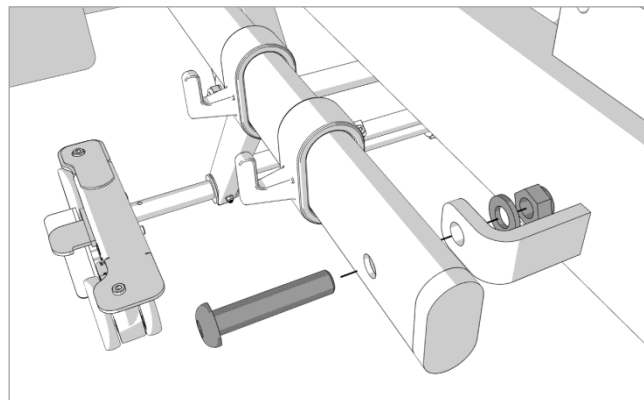


Figure 6.4

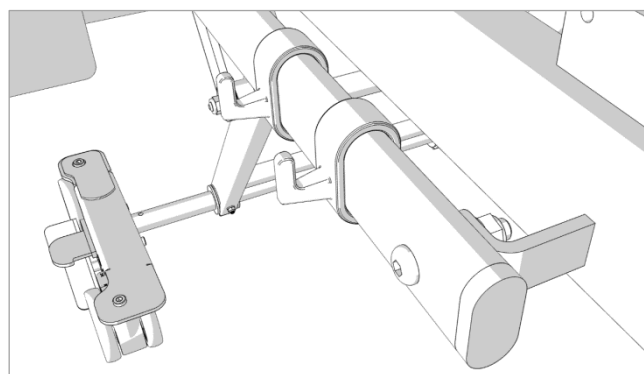


Figure 6.5

7. Fonctionnement-----



ATTENTION

Un contrôle du fonctionnement du produit DOIT être réalisé par un personnel dûment formé et qualifié.

Serrez toujours les freins lorsque le lit est immobile ou laissé sans surveillance.

N'utilisez PAS la fonction de hauteur au sol lorsqu'une poche d'urine est accrochée afin d'éviter de l'écraser.

Vérifiez toujours que la poche attachée au support pour poche d'urine ne sera pas écrasée ni coincée si vous utilisez la fonction d'ajustement de hauteur de lit.

1. Pour accrocher une poche d'urine, ajustez la position des crochets en les faisant coulisser à gauche et à droite comme illustré sur la Figure 7.1, puis accrochez-y la poche. Assurez-vous que la poche n'est pas trop tendue et ajustez la position des crochets si nécessaire.

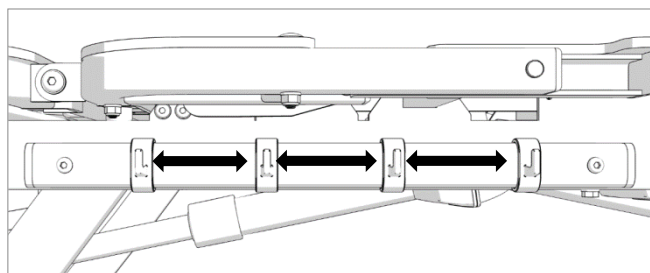


Figure 7.1

8. Contrôle du fonctionnement du produit-----



ATTENTION

Un contrôle du fonctionnement du produit DOIT être réalisé par un personnel dûment formé et qualifié.

Serrez toujours les freins lorsque le lit est immobile ou laissé sans surveillance.

1. Assurez-vous que les crochets ne sont pas endommagés.
2. Assurez-vous que les rails ne sont pas endommagés.
3. Assurez-vous que les deux capuchons sont bien en place et bien fixés.
4. Assurez-vous que les crochets peuvent coulisser librement.
5. Assurez-vous que les fixations sont bien serrées et que le rail ne peut pas bouger sur le support de fixation.

9. Nettoyage et désinfection -----



ATTENTION

Lorsque vous nettoyez ou désinfectez le lit, celui-ci doit être débranché de sa source d'alimentation électrique.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées par une personne compétente après le nettoyage et la désinfection.

Le lit DOIT être nettoyé et désinfecté avant d'être réutilisé par un nouveau patient.

Informations de nettoyage

Pour désinfecter le lit et les accessoires :

- N'utilisez que des produits nettoyants conçus pour être utilisés dans le domaine des soins de santé.
- N'utilisez pas d'abrasifs, d'éponges métalliques ou d'autres matériaux susceptibles d'endommager les couches de revêtement.
- N'utilisez pas de produits corrosifs, caustiques ou acides forts.
- N'utilisez pas de détergents susceptibles d'altérer la structure ou le comportement des matières plastiques (essence, etc.).
- Nettoyez avec un chiffon humide.

Le lit et les accessoires ne sont pas conçus pour être entretenus dans des nettoyeurs automatiques de lit ou pour être nettoyés à l'eau sous pression, par pulvérisation, sous une douche ou à la vapeur.

Accora ne peut être tenu responsable de tout dommage ou de tout risque de dommage en cas d'utilisation de produits de nettoyage ou de désinfection inappropriés.

Le nettoyage doit être effectué à intervalles réguliers, déterminés par l'établissement. Le lit et les accessoires doivent être nettoyés entre chaque patient.

Procédure de nettoyage :

1. Le nettoyage du rail et des crochets est décrit dans la section « Informations de nettoyage » ci-dessus.

10. Stockage-----

Afin de ne rencontrer aucun problème lors du stockage du produit, nous recommandons de :

1. Débrancher l'alimentation électrique du lit.
2. Retirer tous les accessoires.
3. Envelopper les accessoires ou les couvrir afin de ne pas endommager les couches de revêtement et les pièces en plastique.
4. Les accessoires doivent être stockés à une température comprise entre -10 °C et +50 °C.
5. Les accessoires doivent être stockés à une humidité relative (sans condensation) comprise entre 20 % et 80 %.

11. Inspection quotidienne -----



ATTENTION

Assurez-vous que le mécanisme de fixation est toujours bien serré lorsque le support pour poche d'urine est utilisé.

Il est fortement recommandé de réaliser une inspection visuelle tous les jours. Elle peut être effectuée par le soignant, l'utilisateur ou toute autre personne.

Les vérifications suivantes doivent être effectuées :

1. Le support pour poche d'urine est-il trop lâche sur son support de fixation ?
2. Des signes de mauvaise utilisation ou d'une usure excessive sont-ils présents ?
3. Le support pour poche d'urine a-t-il été installé conformément aux instructions ?

Si, pendant l'inspection, vous observez que le produit est endommagé, qu'il y a des problèmes de fonctionnement, ou si vous avez toute inquiétude, cessez d'utiliser le lit et prenez les mesures appropriées.

12. Entretien général-----



ATTENTION

L'entretien DOIT être effectué par un personnel dûment formé et qualifié.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées après l'entretien par un personnel dûment formé et qualifié.

N'effectuez pas l'entretien si l'utilisateur ou le patient se trouve dans le lit.

Pour plus d'informations concernant la maintenance et les réparations du modèle Proxima, consultez le manuel de maintenance. Les réparations du lit doivent être effectuées par un personnel dûment formé et qualifié.

13. Garantie -----

Le support pour poche d'urine est couvert par une garantie de 2 ans.

14. Mise au rebut-----

En cas d'élimination des matériaux provenant du lit, les pièces en fin de vie doivent être éliminées conformément aux réglementations environnementales en vigueur.

15. Définition des symboles-----

	Avertissement général
	Précautions générales
	Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter le manuel d'utilisation
	Représentant de la CE

16. Coordonnées-----

	Royaume-Uni et reste du monde	États-Unis
Adresse	Accora Ltd. Charter House Barrington Road Orwell Cambridge SG8 5QP Royaume-Uni	Accora Inc. 9210 Corporate Blvd. Suite 120 Rockville MD 20850 États-Unis
Téléphone	+44 (0)1223 206100	+1 301-560-2400
E-mail	info@accora.care	information@accora.care
Site Web	www.accora.care	

Cette page a été laissée vide intentionnellement

Accora



Accora
Barrington Road
Orwell
Cambridge
SG8 5QP
Royaume-Uni

Tél. : +44 (0)1223 206100
info@accora.care
www.accora.care